




# Bouton poire de lit BT-B

## Manuel d'utilisation

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T

# Aperçu

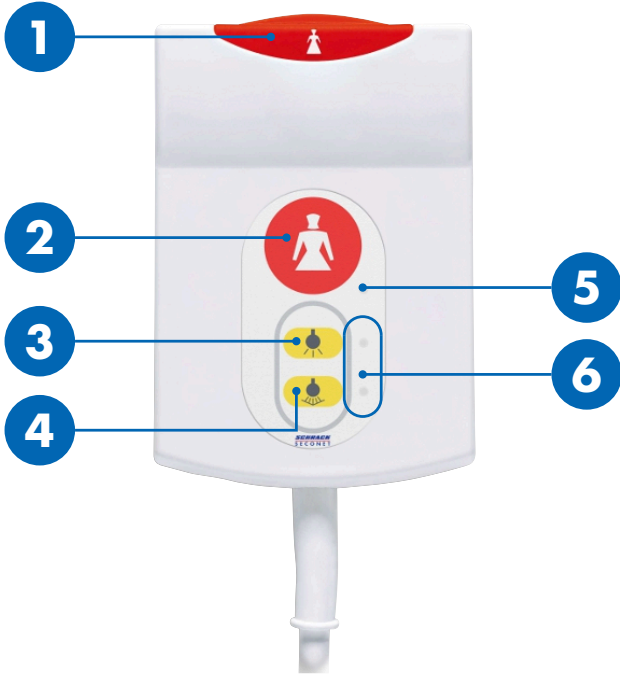

<b>1 / 2</b>	<b>Boutons d'appel</b>
<b>3</b>	<b>Lumière de la chambre</b>
<b>4</b>	<b>Lampe de lecture</b>
<b>5</b>	<b>LED du bouton d'appel (voyant rassurant)</b>
<b>6</b>	<b>LED du bouton de lumière (voyant de position)</b>




### **ATTENTION**

#### **Ne pas utiliser pour se lever**

Le câble et le dispositif ne sont pas une aide pour se lever. Ne pas tirer sur le dispositif pour se redresser.

## **Appel personnel soignant**

Le bouton d'appel  **1** et la LED **5** sont allumés en permanence pour pouvoir les trouver facilement, y compris dans le noir.

### **Appeler le personnel soignant**

Appuyer sur le bouton d'appel  **1** ou **2**.

- ▶ Le bouton d'appel  **1** et la LED **5** s'allument.

## **Allumer et éteindre la lumière**

Les LED des boutons de lumière **6** sont allumées en permanence pour pouvoir les trouver facilement, y compris dans le noir.

### **Lumière de la chambre (en option)**

Appuyer brièvement sur le bouton de lumière dans la chambre  **3**.

- ▶ La lumière s'allume ou s'éteint.

### **Lampe de lecture (en option)**

Appuyer brièvement sur le bouton de lampe de lecture  **4**.

- ▶ La lampe de lecture s'allume ou s'éteint.



FR

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T