




# Pasientterminal PAT-L

## Bruksanvisning

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T

# Oversikt

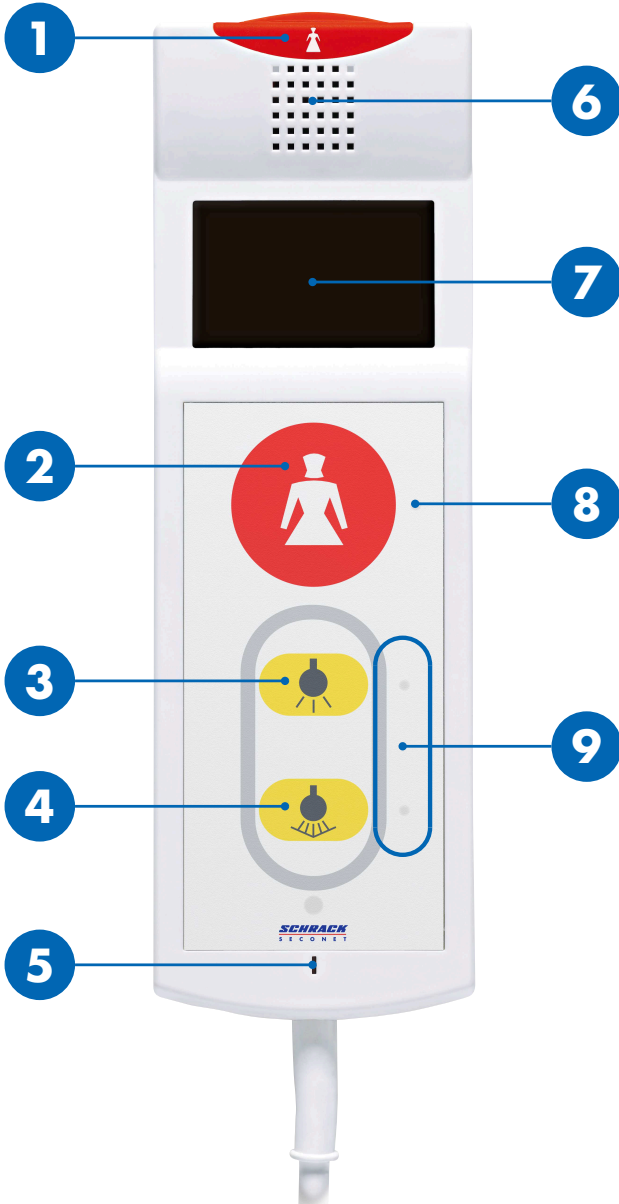

<b>1 / 2</b>	<b>Tilkallingsknapp</b>
<b>3</b>	<b>Romlys</b>
<b>4</b>	<b>Leselys</b>
<b>5</b>	<b>Mikrofon</b>
<b>6</b>	<b>Høytaler</b>
<b>7</b>	<b>Display</b>
<b>8</b>	<b>LED på tilkallingsknapp (forsikringslys)</b>
<b>9</b>	<b>LED på lysknapp (søkelys)</b>



### **FORSIKTIG**

#### **Ikke bruk som hjelp til å reise seg opp**

Ledning og apparat er ikke hjelp til å reise seg opp. Ikke dra deg selv opp ved bruk av apparatet.

## **Tilkalling av omsorgspersonell**

Tilkallingsknappen  **1** og LED-lyset **8** lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

### **Tilkall omsorgspersonell**

Trykk på tilkallingsknappen  **1** eller **2**.

- ▶ Tilkallingsknappen  **1** og LED-lyset **8** lyser opp.

### **Svar fra omsorgspersonell**

1. Pling-lyd over høytaleren **6** og tilkallingsknappen/LED-lyset blinker.
2. Bruk pasientterminalen som en telefon for å snakke med omsorgspersonellet.
3. Omsorgspersonellet avslutter samtalen når denne er ferdig.

## **Skrumlyset av og på**

LED-lyset på lysknappene **9** lyser kontinuerlig, slik at knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

### **Romlys (valgfritt)**

Trykk raskt på knappen for romlys  **3**.

- ▶ Romlyset skrur på eller av.

### **Leselys (valgfritt)**

Trykk raskt på knappen for leselys  **4**.

- ▶ Leselyset skrur på eller av.



NO

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T