



VISOCALL IP. Personāla iekārta ST-TOUCH.

īsās instrukcijas.

HEALTH CARE


SCHRACK
SECONET



(1) Vispārīga informācija

Lietotāja saskarne tiek darbināta ar skārienjutīgo paneli. Jūs pārvietojaties pa personāla galiekārtas programmatūru Staff Terminal, izmantojot izvēlnes, kas atveramas, pieskaroties ikonām un pogām. Velciet uz augšu vai uz leju pa displeja ekrānu, lai pārvietotos pa saturu sarakstu ar vairāk nekā 6 saraksta ierakstiem. Pārvelciet pa kreisi vai pa labi pa displeja ekrānu, lai pārvietotos pa atsevišķu funkciju satura izvēlni. Balta ritjosla parādās labajā vai apakšējā displeja malā (atkarībā no lietojumprogrammas).

Pieskarieties attiecīgajai ikonai, lai atvērtu šo ikonu vai uzsāktu skaidrojumu par dažādiem ciļņiem un apakšizvēlnēm. Tas attiecas uz ciļņu joslu, saraksta ierakstiem un funkcionālo zonu. Divreiz pieskaroties vienam ciļņu sarakstam, atveras palātu saraksts.

Lai izietu no attiecīgā saraksta vai apakšizvēlnes, jāpieskaras ikonai  ierakstu saraksta apakšizvēlnē un funkciju izvēlnē.

Personāla galiekārtas VISOCALL IP īsās instrukcijas ir paredzētas kā uzziņu palīgmateriāls, pieņemot, ka pamatzināšanas tiek iegūtas no **personāla galiekārtas VISOCALL IP ekspluatācijas instrukcijas** (K-HB-023LV).

(2) Statusa josla



Manuālais nodaļu starpsavienojums

Konkrēta nodaļa ir manuāli savienota ar citu nodaļu.



Pasīvs nodaļu starpsavienojums

Cita nodaļa ir savienota ar konkrēto nodaļu.



Vietējā centralizācija aktīva

Nodaļa rāda izsaukumus tikai personāla galiekārtā.



Vispārējā centralizācija aktīva

Nodaļas izsaukumus var dzirdami atskaņot tikai centrālajā vadības panelī.



Pakalpojumu līmenis 1 vai 2

Šis statuss tiek parādīts, ja notiek pāreja no standarta 0 līmeņa (bez displeja) uz 1. vai 2. līmeni.

(3) Sarakstu cilne



Izsaukumu saraksts

Satur visus izsaukumus visā aprūpes zonā.



Atgādinājumu saraksts

Satur visas palātas ar iestatītu atgādinājumu.



Klātbūtnes saraksts

Satur visas palātas ar iestatītu klātbūtni.



Kļūdu saraksts

Satur visus esošos traucējumus bojājumus aprūpes zonā, kā arī trešo pušu sistēmās.

Sarakstu cilņu statuss:



Sarakstā nav ierakstu, un tas nav atlasīts.



Sarakstā ir ieraksti, un tas nav atlasīts.



Sarakstu cilne ir atlasīta un atvērta.

(4) Ikonas - izsaukumu displejs

Iespējams parādīt šādu izsaukumu tipu ikonas:



Izsaukums no palātas



Ārkārtas izsaukums



Ārsta izsaukums



Sirds izsaukums



Izsaukums uz vannas istabu vai tualeti (vaicājums nav iespējams)



Ārkārtas izsaukums uz vannas istabu vai tualeti (vaicājums nav iespējams)



Izsaukums no gultas



Gultas ārkārtas izsaukums



Persnāla izsaukums



Diagnostikas izsaukums (vaicājums nav iespējams)



Ugunsgrēka trauksme (vaicājums nav iespējams)



Dezorientācijas trauksmes signāls (vaicājums nav iespējams)



Dezorientācija, baterija izlādējusies (vaicājums nav iespējams)



Dezorientācija, manipulācija (vaicājums nav iespējams)



Dezorientācijas draudu (vaicājums nav iespējams)



Diagnostikas atslēgšanas izsaukums (vaicājums nav iespējams)



Gultas atslēgšanas izsaukums



Vispārējs notikums

(5) Klātbūtnes un izsaukumu ikonas

Vienā lapā iespējams defi nēt 3 ikonas (izsaukuma vai klātbūtnes), un šīs ikonas var pasūtīt pēc izvēles (sistēmas konfi gurācija).

- noteikta personāla klātbūtne (medmāsa, apkalpojošais personāls vai ārsts),
- izsaukumu aktivizēšana ar defi nētu izsaukumu (izsaukums vai ārkārtas izsaukums).

Izsaukuma funkcija

(izsaukums vai ārkārtas izsaukums)

neaktīva/aktīva



Medmāsa



Ārsts



Sirds izsaukums

Klātbūtnes funkcija:

neaktīva/aktīva



Medmāsa



Apkalpojošais personāls









Ārsts

(aktīva: nepārtraukta gaisma izsaukumu laikā, mirgojoša gaisma ārkārtas izsaukumu laikā)

(6) Funkciju ikonas

Funkciju ikonas tiek parādītas funkciju zonas vidusdaļā, un tās iespējams sadalīt pa vairākām displeja ekrāna lapām (skat. ritjoslu). Funkcijas ikonas attēls ir atkarīgs no attiecīgā pakalpojumu līmeņa.

	Starpsavienojums		
	Aktivizēšana vietējā centralizācijā		Deaktivizēšana vietējā centralizācijā
	Vispārējs paziņojums		Paziņojums medmāsām
	Ārsta paziņojums		Personāla paziņojums
	Tālrunis		Radio
	Zvana melodija		Skaļums
	Laika un datuma iestatīšana		Displeja iestatīšana
	Pārslēgt pakalpojumu līmenis		Iziet pakalpojumu līmenis

(7) Izsaukumu displejs

Tiklīdz nodaļā tiek aktivizēts izsaukums, displejs automātiski mainās un tiek atvērta izsaukumu saraksts.

Tiek parādīta informācija par palātas vai gultas numuru un izsaukuma tipu. Ja ir saņemti vairāki vienlaicīgi izsaukumi, augstākās prioritātes izsaukums vienmēr tiek rādīts visaugstāk.



14:23 10.04.2014

izsaukums ar visaugstāko prioritāti

izsaukuma tips

gultas atrašanās vieta

palātas atrašanās vieta

ikona – izsaukuma tips


	Ārsta izsaukums Nodaļa A Telpa 1	
	WC ārkārtas izs. Gaitenis Nodaļa A Telpa 3	
	Gultas ārkārtas izs. Gulta 1 Nodaļa A Telpa 2	
	Ārkārtas izsaukums Nodaļa A Telpa 4	
	Persnāla izsaukums Gulta 2 Nodaļa A Telpa 2	

(7.1) Izsaukumu vaicājums

Šis displejs parāda atlasīto vaicājumu sakarā ar ārkārtas izsaukumu no gultas.




Pieskaroties saraksta ierakstam, veic izsaukuma vaicājumu un atver izvēlni.

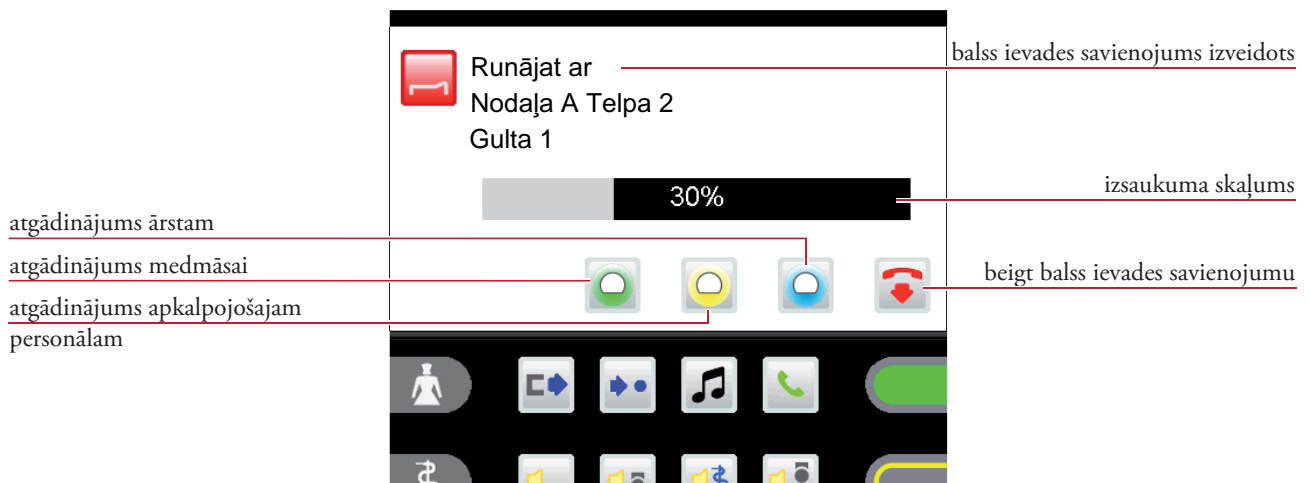

Balss ievades savienojums

Tiek izveidots automātiski, pieskaroties izsaukumu saraksta ierakstam.

Izsaukuma skaļumu (skaļrunis/klausule) var mainīt, sarunas laikā pieskaroties skaļuma joslai.

Pieskaroties ikonai , balss ievades savienojums tiek nekavējoties pārtraukts, un savienojums tiek automātiski pārtraukts pēc 2 minūtēm.


Pieskaroties ikonai , , vai , tiek iestatīts atgādinājums medmāsai, apkalpojošajam personālam vai ārstam. (Skat, 7.2. nodaļu - Atgādinājums).


Izsaukuma vaicājums bez mikrofona un skaļruņa

Ja saruna nav iespējama sakarā ar perifērijas ierīcēm (piemēram, izsaukums no tualetes), jūs nevarat atbildēt uz konkrēto izsaukumu.



Pieskarties saraksta ierakstam, lai veiktu vaicājumu izsaukumam no tualetes. Izvēlne ir atvērta, un dzirdams brīdinājuma signāls.

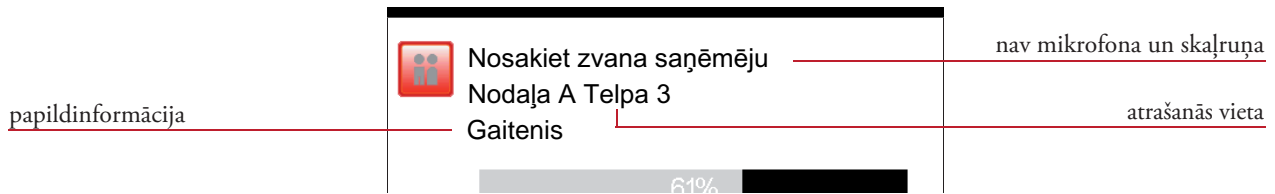






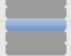
Dieser Ruf kann nicht durch Tippen auf das Symbol  quittiert werden, Sie müssen die Rufstelle aufsuchen und den Ruf vor Ort quittieren.

Merkschaltungen für Servicepersonal, Schwester oder Arzt können gesetzt werden.

(7.2) Atgādinājums

Tas ļauj identifi cēt istabu pēc izsaukuma vaicājuma, ja no zvanītāja nav atbildes, ir saņemts izsaukums bez balsis ievades savienojuma, dzirdams aizņemts signāls, ir veikti citu izsaukumu vaicājumi pirms šī izsaukuma vietas meklēšanas vai izsaukumi citām personām (medmāsām, apkalpojošajam personām vai ārstam) tiek pārraidīti selektīvi.

Pieskarties saraksta ierakstam izsaukumu sarakstā. Atveras izvēlne:

	Medmāsai	(statusa norāde: 	mirgo zaļā gaisma)
	Apkalpojošajam personālam	(statusa norāde: 	mirgo dzeltenā gaisma)
	Ārstam	(statusa norāde: 	mirgo zilā gaisma)

Saraksta ieraksts (pašreizējais izsaukums - piemēram, gultas trauksmes zvans) tiek izņemts no izsaukumu saraksta un pārsūtīts uz atgādinājumu sarakstu.


Atgādinājums vienmēr tiek atiestatīts ar attiecīgo klātbūtnes pogu izsaukuma veicēja palātā!

Izsaukumi, kas tiek aizturēti, izmantojot atgādinājumu, un nav atiestatīti ar attiecīgo klātbūtnes pogu (izsaukuma veicēja palātā), tiek automātiski atjaunoti pēc noteikta laika, un atveras izsaukumu saraksts.



(8.1) Palātu pārskats


No jauna pieskarties jau atlasītajai sarakstu cilnei cilņu joslā - izsaukumu, atgādinājumu, klātbūtnes vai kļūdu sarakstam (piemēram, izsaukumu sarakstam).

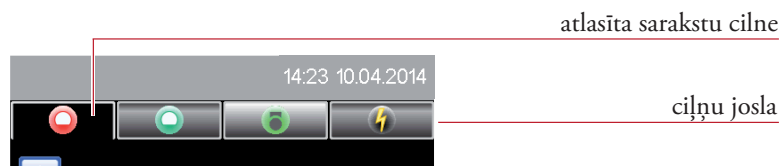


Pēc palātu saraksta atvēršanas pieskarties attiecīgā saraksta ierakstam.



Visas palātā esošās gultas tiek parādītas palātu pārskatā. Tiek parādītas visas, kuras iespējams izmantot šajā palātā.

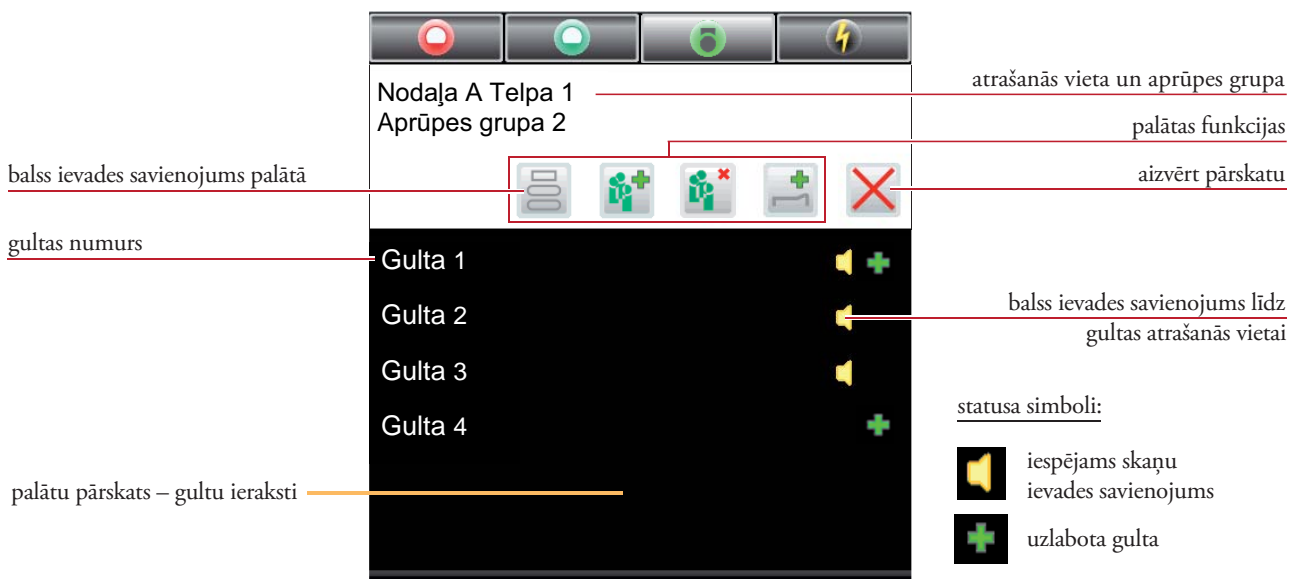

Balsis ievades savienojums ar sakaru galiekārtu tiek izveidots, pieskaroties palātas ikonai . Pieskaroties gultas numuram, tiek izveidots balsis ievades savienojums tieši pacientam.

(8.2) Palātas funkcijas

Palātai var izmantot šādas funkcijas:



Piešķirt aprūpes grupu



Atcelt aprūpes grupas piešķiri



Gultas uzlabošana



Balsis ievades savienojums ar palātu


(9) Nodaļu starpsavienojums

Tas ļauj veidot aprūpes zonas, kas sastāv no divām vai vairākām nodaļām. Katra izsaukuma indikācija, nosūtīšana un vaicājumu iespēja tiek paplašināta saskaņā ar prioritātēm, kas iestatītas visās šīs zonas nodaļu galiekārtās un sakaru galiekārtās.

(9.1) Starpsavienojums neaktīvs

Funkciju zonā pieskarieties ikonai , lai atvērtu starpsavienojumu sarakstu.


Ja joprojām nav nodibināts aktīvs starpsavienojums starp konkrēto nodaļu un citu nodaļu, tiek piedāvāts nodaļu saraksts ar iespējamiem savienojumiem. Pieskaroties vajadzīgajai nodaļai saraksta ierakstā, tiek aktivizēts nodaļu starpsavienojums.

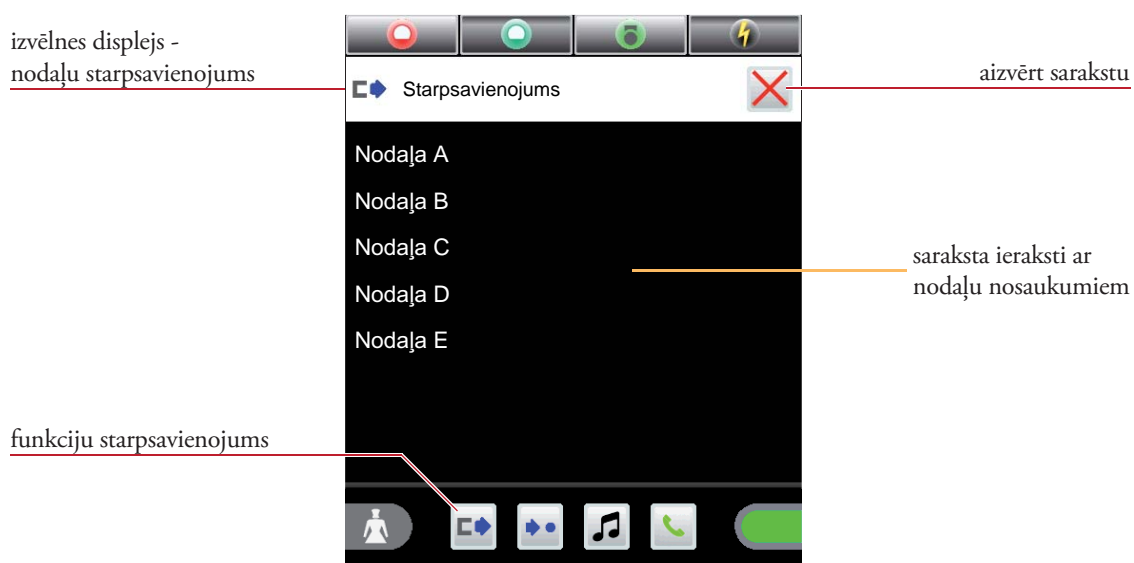

(9.2) Aktīvs starpsavienojums

Funkciju zonā pieskarieties ikonai , lai atvērtu starpsavienojumu sarakstu.

Ja konkrētai nodaļai jau pastāv savienojums ar citu nodaļu, tiek parādītas visas šādas grupas nodaļas.

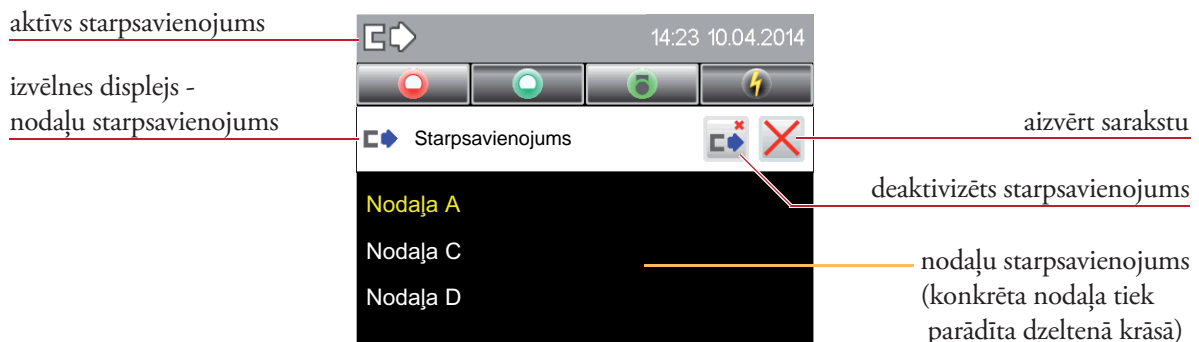

Šajā skatījumā nodaļu starpsavienojumu var atcelt, pieskaroties ikonai .

(10) Paziņojumi



Paziņojumus var veikt vai nu pa klausulē iebūvēto mikrofoni, vai arī ar pašu klausuli.



Vispārējs paziņojums

Paziņojums tiek veikts visām palātām aprūpes zonā.



Paziņojums medmāsām

Paziņojums tiek veikts visām palātām aprūpes zonā, kurās ir aktivizēta medmāsu vai apkalpojošā personāla klātbūtne.



Paziņojums ārstam

Paziņojums tiek veikta visām palātām aprūpes zonā, kurās ir aktivizēta ārsta klātbūtne.



Paziņojums apkalpojošajam personālam

Visām palātām aprūpes zonā, kurās ir aktivizēta medmāsu, apkalpojošā personāla vai ārsta klātbūtne.

Funkciju zonā pieskarti attiecīgajai paziņošanas ikonai, lai sāktu paziņojumu.



Paziņojumu var beigt, vai nu pieskaroties ikonai , paziņojumu var beigt, vai nu pieskaroties ikonai .

(11.1) Tālrunis - izsaukumu iestatīšana




Funkciju zonā pieskarti ikonai , lai atvērtu izvēlni.

Aktīvajā zonā pieskarti ciparu ikonām **0 - 9**, lai atlasītu attiecīgo izsaukumu numurus.




Pieskaroties ikonai , tiek apstiprināts izsaukamais numurs un izveidots savienojums.

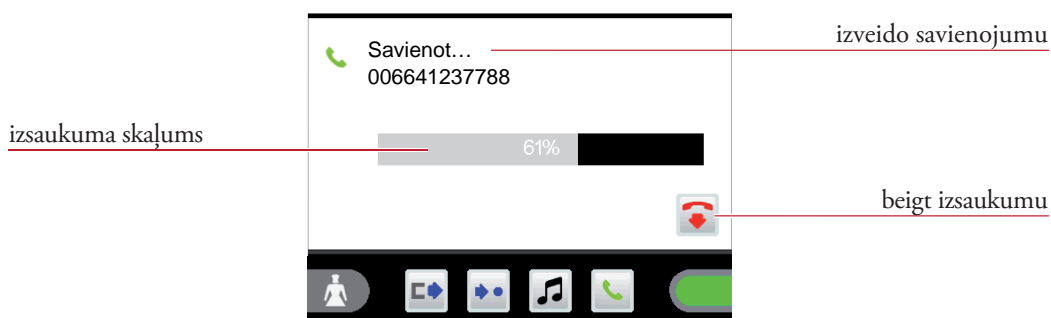

Izsaukuma skaļumu (skaļrunis / klausule) var mainīt sarunas laikā, pieskaroties skaļuma joslai.

(11.2) Atbilde uz telefona zvanu

Telefona izsaukuma laikā zvanītāja numurs un vārds tiek parādīts neatkarīgi no telefona sistēmas konfi gurācijas.

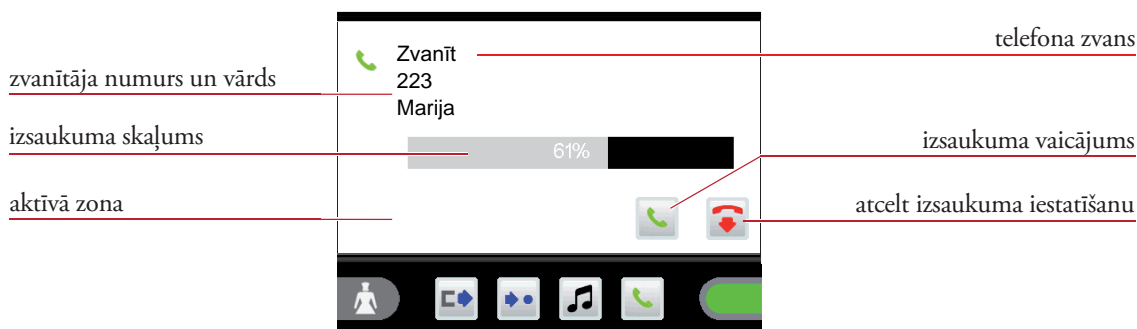

Aktīvajā zonā pieskarties ikonai , lai izveidotu izsaukuma savienojumu.

Izsaukuma skaļumu (skaļrunis / klausule) var mainīt sarunas laikā, pieskaroties skaļuma joslai.

(12) Tīršana un dezinficēšana

Personāla galaiekārtas tīršanai un dezinficēšanai var izmantot tikai tādus dezinficēšanas līdzekļus, kas ne daļēji, ne pilnībā nesatur ketonus, nedz esterus. Dezinficēšana jāveic, ierīci noslaukot, nevis iegremdējot.

Ja var pieņemt, ka bojātie izstrādājumi ir inficēti, tie jānotīra un jādezinficē, pirms tos nosūta atpakaļ remontam saskaņā ar šo paziņojumu.

(13) Eksploatācija un tehniskā apkope

Izsaukumu sistēmas VISOCALL IP eksploatācijai ir piemērojami standarta DIN VDE0834 9. panta 1. daļas noteikumi. Tādēļ mēs vēlamies izmantot šo iespēju atgādināt, ka minētais standarta pants cita starpā paredz periodiskās apskates un tehniskās apkopes, ko mēs labprāt veiksīm Jūsu uzdevumā.



SCHRACK SECONET AG

Eibesbrunnnergasse 18

A-1120 Vienna

Tel.: +43-1-81157-0

office@schrack-seconet.com

www.schrack-seconet.com

LV

Czech Rep. • CZ-100 00 Prague 10, V Úžlabině 1490/70 • Tel.: +420-2-74782284

Hungary • HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 • Tel.: +36-1-4644300

India • IN-122002 Gurgaon, DLF Golf Course Road, Sector-54 • Tel.: +91-124-4141501

Poland • PL-02-672 Warsaw, ul. Domaniewska 44a, bud. Platinum V • Tel.: +48-22-33 00 620

Romania • RO-023961 Bucharest, Str. Mântuleasa nr. 15A/1, Sector 2 • Tel.: +40-372 756 316

Russia • RU-129626 Moscow, Ul. Staroalexejevskaja 5 • Tel.: +7-495-510 50 15

Slovakia • SK-83527 Bratislava–Rača, Mudrochova 2 • Tel.: +421-2-44635595

Sweden • SE-145 84 Norsborg, Botvid Business Center • Tel.: +46-8-680 18 60

Turkey • TR-34722 Kadıköy–İstanbul, Kasap İsmail Sk. 5/5 • Tel.: +90-216-345 51 99

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T