



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

HE

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET

תמונה לשיווק בלבד
Schrack - K-HB-0055HE - V 1.1 - 08.2020 תוצרת ©

לחצני קריאה	2 / 1
תאורת חדר	3
תאורת קריאה	4
LED של לחצן קריאה (תאורת הרגעה)	5
LED של כפתור תאורה (תאורת גילוי)	6

זהירות

אסור להשתמש בעזר לטיפוס



הכבל והמכשיר אינם עזר לטיפוס. אל תמשוך את עצמך מעלה ע"י שימוש במכשיר.

1.1 קריאה לצוות סיוע

לחצן הקריאה a 1 וה-LED 5 מוארים באופן תמידי, כדי שיהיה ניתן למצוא את מיקומם של הלחצנים גם בחושך, בקלות רבה יותר.

1.1.1 יצירת קשר עם צוות הסיוע

לחץ על לחצן הקריאה a 1 או 2. לחצן קריאה a 1 ו-LED 5 נדלקים.

1.2 כיבוי והדלקה של התאורה

ה-LED של כפתורי התאורה 6 מוארים באופן תמידי, כדי שיהיה ניתן למצוא את מיקומם של הכפתורים גם בחושך, בקלות רבה יותר.

1.2.1 תאורת חדר (אופציונלי)

לחץ על כפתור תאורת החדר b 3 לחיצה קצרה.


לחיצה קצרה תאורת החדר נדלקת ונכבית.

1.2.2 תאורת קריאה (אופציונלי)

לחץ על כפתור תאורת החדר c 4 לחיצה קצרה.

לחיצה קצרה תאורת הקריאה נדלקת ונכבית.

1 סקירה כללית

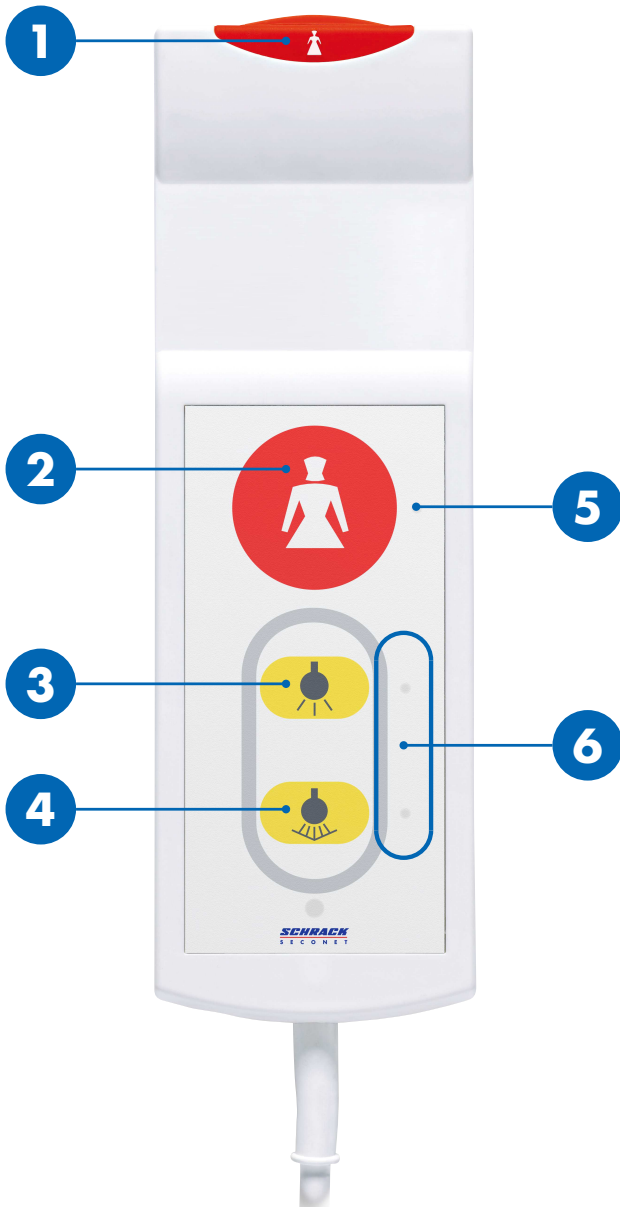



לחצן מצוקה IP-BT

מדריך למשתמש

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T