



VISOCALL IP. Staff Terminal ST-TOUCH.

Beknopte handleiding.

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T




(1) Algemeen

De bediening van de bedrijfsmodus gebeurt via het touch panel. De navigatie van de Staff Terminal Software leidt u door de menu's, die u via het aantippen van symbolen en knoppen kunt opvragen. Voor een uitgebreide aanduiding van de inhoud in lijsten met meer dan 6 lijstvermeldingen, veegt u naar boven resp., naar onderen over het beeldscherm. Voor de uitgebreide aanduiding van de inhoud van afzonderlijke functies in menu's, veegt u naar links resp. rechts over het beeldscherm. Daarbij verschijnt afhankelijk van het gebruik een witte scrollbalk aan de rechter- of de onderste displayrand.

Door het aantippen van het desbetreffende symbool opent de symboliek resp. verklaring van diverse registerkaarten of submenu's. Dit geldt voor de registerlijsten, de lijstvermeldingen en voor de functies.

Door het nogmaals aantippen van hetzelfde tabblad wordt de kamerlijst geopend.

Door het aantippen van het symbool  bij de submenu's van de lijstvermeldingen en in de functiemenu's, verlaat u de desbetreffende lijst resp. het submenu.

De **beknopte handleiding van de VISOCALL IP Staff Terminal** dient als ondersteuning en biedt de basiskennis, die u nodig hebt voor de **gebruikershandleiding van de VISOCALL IP Staff Terminal (K-HB-023NL)**.

(2) Statusregel



Handmatige afdelingsamenschakeling

Het eigen station is handmatig met een ander station is gekoppeld.



Passieve afdelingsamenschakeling

Een ander station is met het eigen station gekoppeld.



Lokale centralisatie actief

Het station toont alleen nog oproepen op de Staff Terminal.



Globale centralisatie actief

De oproepen van het station worden alleen nog akoestisch weergegeven op een centraal controlestation.



Serviceniveau 1 of 2

Deze status wordt weergegeven als vanuit het standaard niveau 0 (geen aanduiding) naar niveau 1 of 2 wordt geschakeld.



(3) Lijsttabblad



Oproeplijst

Bevat alle oproepgebeurtenissen van de gehele zorgafdeling.



Herinneringlijst

Bevat alle kamers met een ingestelde herinnering.



Aanwezigheidslijst

Bevat alle kamers met een ingestelde aanwezigheid.



Foutenlijst

Bevat alle actuele uitvalgevallen en storingen van de zorgafdeling, evenals van eventuele externe systemen.

Statussen van de lijsttabbladen:



De lijst bevat geen vermeldingen en is niet geselecteerd.



De lijst bevat vermeldingen en is niet geselecteerd.



De lijsttabbladen zijn geselecteerd en de registerkaart is geopend.

(4) Oproepweergave-symbool

De volgende symbolen voor het type oproep kunnen worden weergegeven:







	Kameroproep		Diagnose-oproep niet opvraagbaar
	Kamer-noodoproep		Brandalarm niet opvraagbaar
	Artsroep		DESO Aarm niet opvraagbaar
	Hartalarm		DESO Batterij bijna leeg niet opvraagbaar
	Bad/WC oproep niet opvraagbaar		DESO Manipulatie niet opvraagbaar
	Bad/WC assistentieroep niet opvraagbaar		DESO bedreiging niet opvraagbaar
	Beddenoproep		Diagnose-evaluatie niet opvraagbaar
	Bednoodoproep		Bed-evaluatie
	Service-oproep		Algemene gebeurtenis

(5) Aanwezigheids- en oproepsymbolen







Er kunnen tot 3 symbolen (oproep of aanwezigheid) per pagina worden gedefinieerd. Deze kunnen naar wens worden toegewezen (systeemconfiguratie).

- Aanwezigheid met gedefinieerd personeel (verpleegkundige, servicepersoneel of arts),
- Oproepactivering met een gedefinieerde oproep (roep of noodoproep).

Oproep-functie (roep of noodoproep):
inactief/actief

		Verpleegkundige
		Arts
		Hartalarm

Aanwezigheid-functie:
inactief/actief

		Verpleegkundige
		Servicepersoneel
		Arts

(Continu licht bij oproepen,
knipperend licht bij noodoproepen)

(6) Functiesymbolen

De functiesymbolen worden in het middelste deel van de functiebereiken weergegeven en kunnen over meerdere beeldschermpagina's zijn verdeeld (zie scrollbalk). De weergave van de functiesymbolen is afhankelijk van het desbetreffende serviceniveau.

	Samenschakeling		
	Lokale centralisatie activeren		Lokale centralisatie deactiveren
	Omroep algemeen		Omroep verpleegkundige
	Omroep arts		Omroep servicepersoneel
	Telefoon		Radio
	Beltoon		Volume
	Tijd en datum instellen		Instellingen - Display
	Serviceniveau wisselen		Serviceniveau beëindigen

(7) Oproepaanduiding

Als er in het station een oproep wordt geactiveerd, wijzigt automatisch de displayweergave en wordt de oproeplijst geopend.

De oproeplijst wordt gedetailleerd weergegeven met de vermelding van het kamer- resp. bednummer en het type oproep. Als er tegelijkertijd meerdere oproepen actief zijn, wordt de oproep met de hoogste prioriteit altijd op de bovenste plaats weergegeven.



The screenshot shows a call list interface with the following entries:

- Artsroep** (Blue icon with caduceus) - Afdeling A Kamer 1
- WC-noodoproep Gang** (Red icon with two people) - Afdeling A Kamer 3
- Bednoodoproep Bed 1** (Red icon with bed) - Afdeling A Kamer 2
- Noodoproep** (Red icon with three people) - Afdeling A Kamer 4
- Service-oproep Bed 2** (Yellow icon with bed) - Afdeling A Kamer 2

Annotations in the image point to specific elements:


- Oproep met de hoogste prioriteit** points to the top entry (Artsroep).
- Symbool - Type oproep** points to the call type icon of the top entry.
- Type oproep** points to the text 'Artsroep'.
- Bedpositie** points to the text 'Afdeling A Kamer 1'.
- Kamerpositie** points to the text 'Afdeling A Kamer 2'.

(7.1) Oproep-aanvraag

De volgende weergave toont de geselecteerde aanvraag van een bednoodoproep.




Tip op de lijstvermelding, de oproep wordt aangevraagd en het menu wordt geopend.

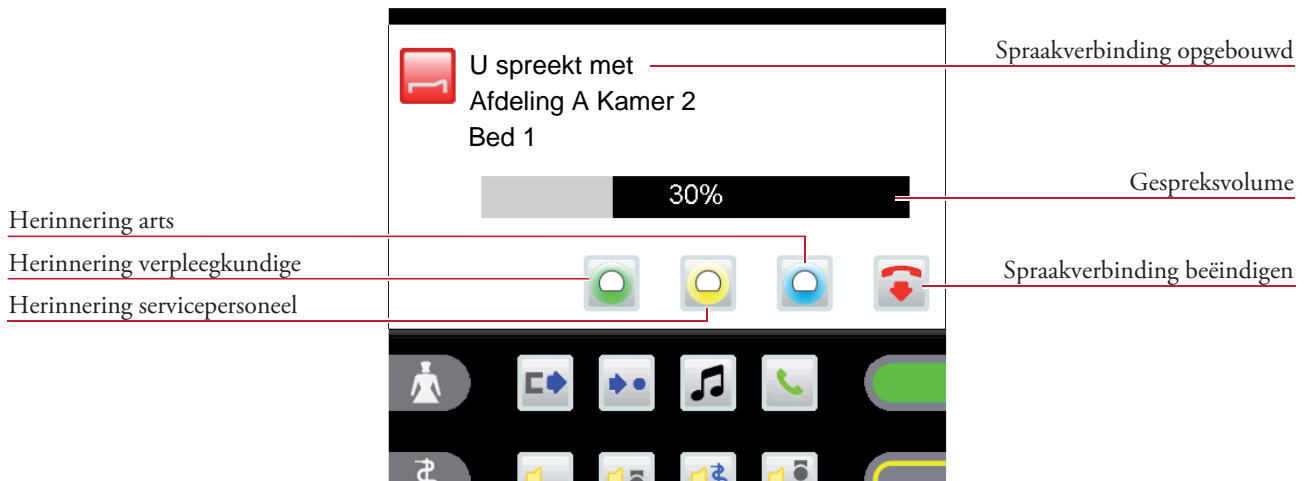




Spraakverbinding

De spraakverbinding wordt automatisch opgebouwd door te tippen op de lijstvermelding van de oproep.

Het gespreksvolume (luidspreker/hoorn) kan tijdens een gesprek d.m.v. aantippen van de volumebalk worden gewijzigd .

Door te tippen op het symbool  wordt de spraakverbinding direct beëindigd. De verbinding wordt automatisch na 2 minuten verbroken.


Door te tippen op het symbool ,  of  wordt er een herinnering voor de verpleegkundige, het servicepersoneel of voor de arts ingesteld (zie hoofdstuk 7.2 - Herinnering).

Oproep-aanvraag zonder spraakmogelijkheid

Als het vanwege de randapparatuur (bijv. WC-oproep) niet mogelijk is om te spreken, kunt u de desbetreffende oproep niet beantwoorden.



Tip op de lijstvermelding om de WC-oproep op te vragen. Het menu wordt geopend en er is een waarschuwingssignaal te horen.

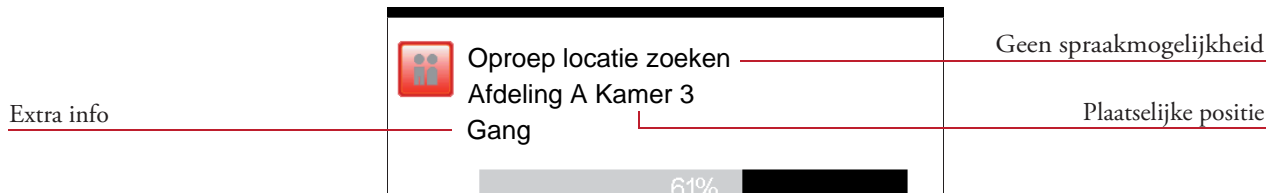


Deze oproep kan niet bevestigd worden door te tippen op het symbool . U moet de oproeplocatie opzoeken en de oproep daar bevestigen.

Herinneringen voor staf, verpleegkundiges of artsen kunnen worden ingesteld.

(7.2) Herinnering

Hiermee is het mogelijk om de markering van kamers na de oproep-aanvraag, in het geval er geen antwoord komt van de beller, het om een oproep zonder spraakverbinding gaat, het bezetteken verschijnt, er voor het oproepen van de oproeplocatie nog andere oproepen worden opgevraagd of er oproepen aan andere personen (verpleegkundige, servicepersoneel of artsen) worden overgedragen.


Tip op het desbetreffende symbool om de herinnering te activeren:

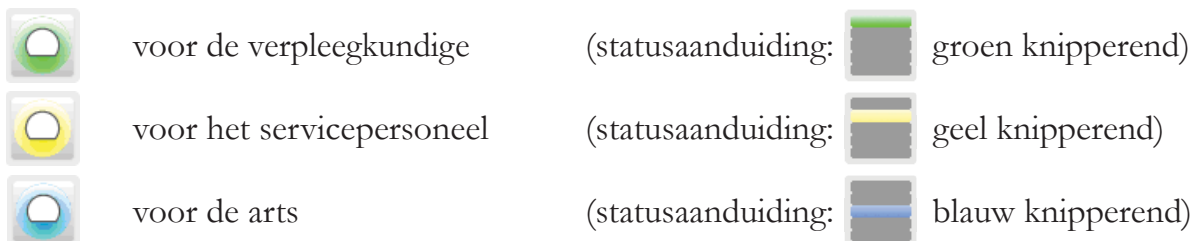

De lijstvermelding (actuele roep - bijv. Bednoodoproep) wordt uit de oproeplijst verwijderd en overgedragen naar de herinneringslijst.


Het terugzetten van een herinnering gebeurt altijd via de desbetreffende aanwezigheidsknop in de kamer van de beller!

Oproepen, die per herinnering geparkeerd zijn en niet met de desbetreffende aanwezigheidsknop (in de kamer van de beller) zijn teruggezet, worden na een bepaalde tijd automatisch opnieuw gegenereerd en de oproeplijst wordt geopend.

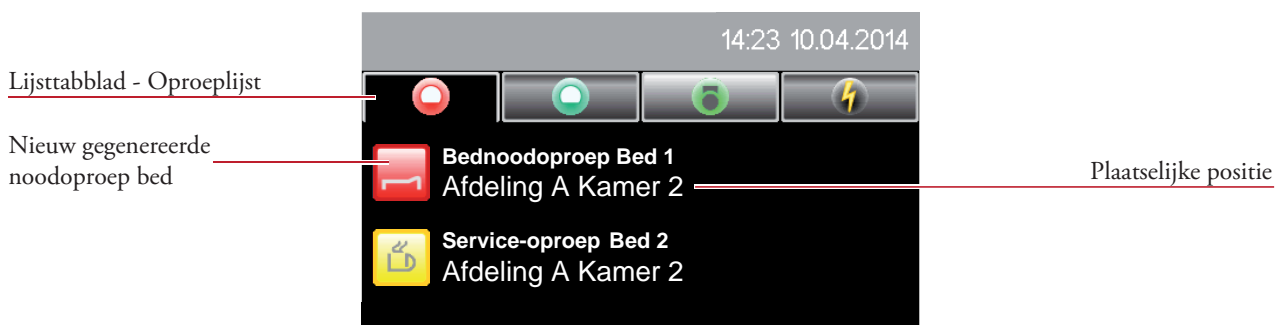

(8.1) Kameroverzicht


Tip nogmaals op een al geselecteerd lijsttabblad in de registerlijst. Dik kan bij de oproep-, herinnering-, aanwezigheids- of foutenlijst zijn (bijv. roeplijst).

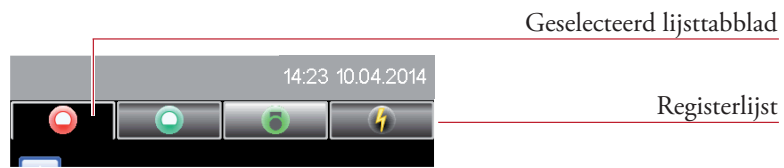

Tip na het openen van de kamerlijst op de desbetreffende lijstvermelding.



In het kameroverzicht worden alle aanwezige bedden in een kamer weergegeven. Hier worden alle kamerfuncties weergegeven die men in deze kamer kan gebruiken.

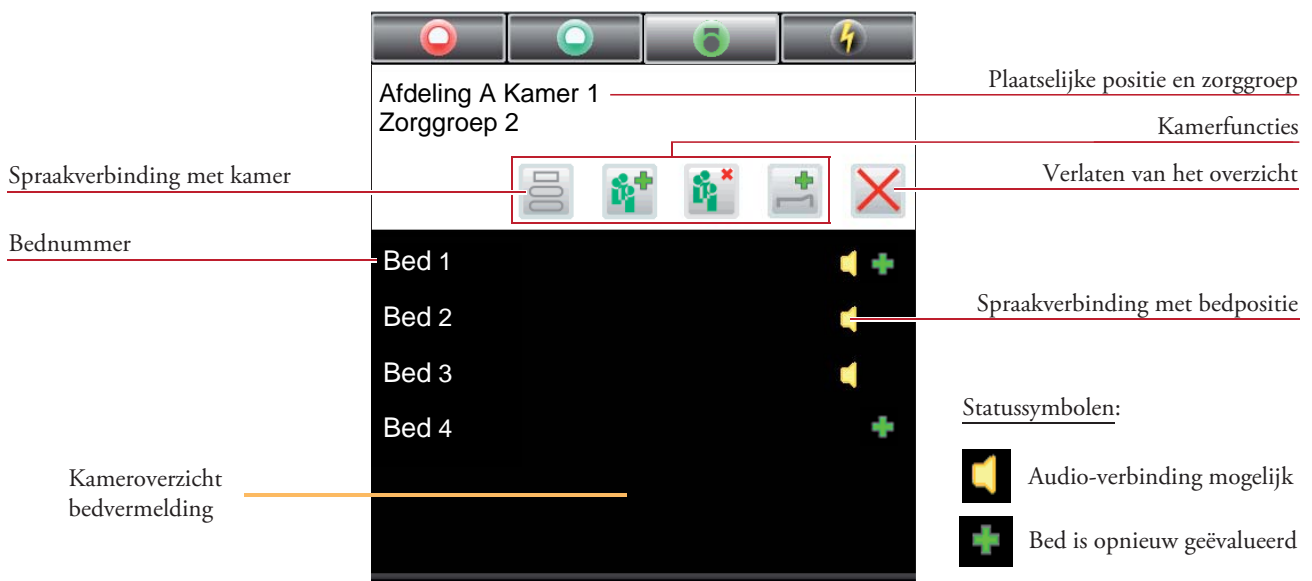

De opbouw van een spraakverbinding met de communicatieterminal gebeurt door te tippen op het kamersymbol . Om direct een spraakverbinding met een patiënt te creëren, tikt u op een bednummer.

(8.2) Kamerfuncties

Voor een kamer kunnen de volgende functies worden gebruikt:



Zorggroep toewijzen



Zorggroepen opheffen



Bed-evaluatie




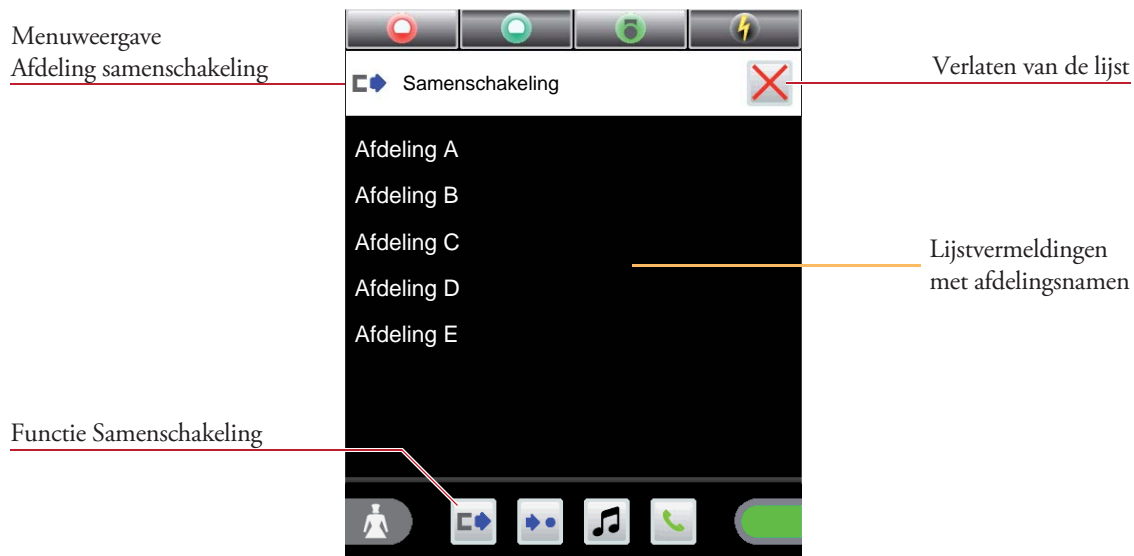
Spraakverbinding met kamer

(9) Afdeling samenschakeling

Deze functie omvat de vorming van zorggebieden, die uit twee of meerdere afdelings bestaan. De weergave, oproepdoorzending en de aanvraagmogelijkheid van een oproep omvat dan deze gebieden volgens de prioriteiten op alle dienstkamerterminals en communicatieterminals.


(9.1) Samenschakeling inactief

Tip in het functiebereik op het symbool , de samenschakelingslijst wordt geopend. Als er nog geen samenschakeling van het eigen afdeling met een ander afdeling actief is, wordt er een lijst van alle mogelijke afdelings weergegeven, waarmee een amenschakeling kan worden opgezet. Door het aantippen van het gewenste afdeling in de lijstvermelding, wordt de samen-schakeling van afdelings actief.



(9.2) Samenschakeling actief

Tip op het symbool , de samenschakelingslijst wordt geopend. Als het eigen afdeling al gekoppeld is aan een ander afdeling, worden alle afdelings weergegeven die in dezelfde afdelingsgroep staan.

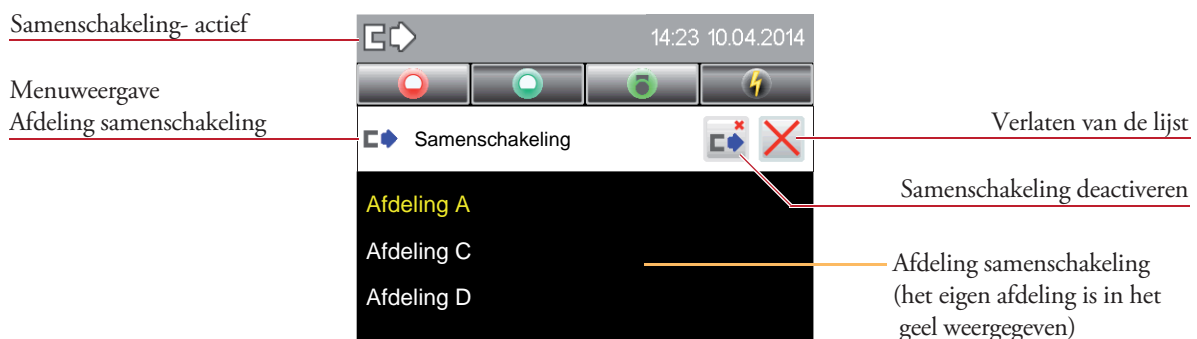

In deze weergave kan de samenschakeling van afdelings weer worden opgeheven door te tippen op het symbool.

(10) Omroep



Het omroep kan oftewel bij een neergelegde hoorn via de ingebouwde microfoon of via de hoorn zelf worden uitgestuurd.



Omroep algemeen

Er wordt een omroep naar alle kamers van het zorggebied gestuurd.



Omroep verpleegkundige

Er wordt een omroep naar alle kamers van het zorggebied gestuurd, waarin de aanwezigheid van een verpleegkundige of servicepersoneel is geactiveerd.



Omroep arts


Er wordt een omroep naar alle kamers van het zorggebied gestuurd, waarin de aanwezigheid van een arts is geactiveerd.



Omroep personeel

Er wordt een omroep naar alle kamers van het zorggebied gestuurd, waarin de aanwezigheid van een verpleegkundige of servicepersoneel of arts is geactiveerd.

Tip in het functiebereik op het desbetreffende omroepsymbool, het omroep wordt verstuurd.

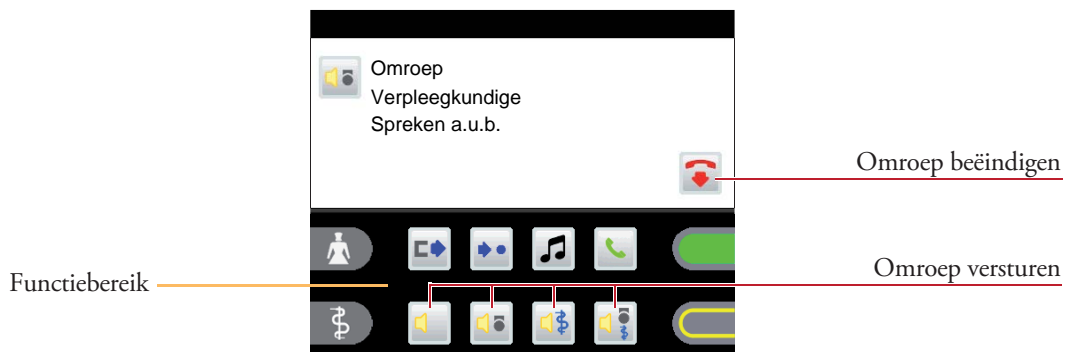


Het omroep kan door het tippen op het symbool  of door het neerleggen van de hoorn worden beëindigd.

(11.1) Telefoon - Gespreksopbouw

Tip in het functiebereik op het symbool , het menu wordt geopend. Tip in het actieve bereik op het cijfersymbool **0** - **9** om het desbetreffende oproepnummer te selecteren.




Door het aantippen van het symbool  wordt het oproepnummer bevestigd, de gespreksverbinding wordt opgebouwd.

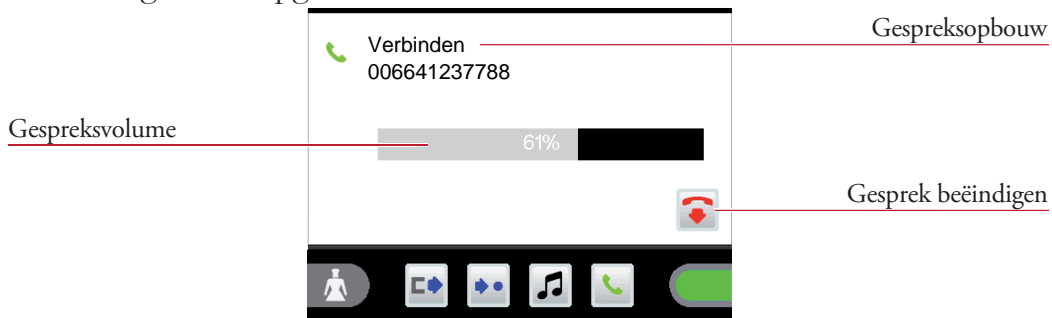


Het gespreksofbouw (luidspreker/hoorn) kan tijdens een gesprek d.m.v. aantippen van de volumebalk worden gewijzigd.

(11.2) Telefonische oproep aanvragen

Bij een telefonische oproep worden de oproepnummers en de namen, afhankelijk van de configuratie van het telefoonsysteem, weergegeven.

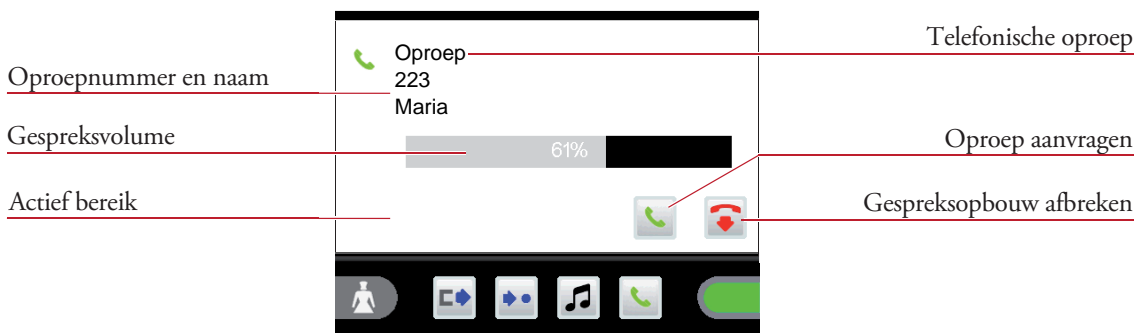

Tip in het actieve bereik op het symbool , de gespreksverbinding wordt opgebouwd. Het gespreksofbouw (luidspreker/hoorn) kan tijdens een gesprek d.m.v. aantippen van de volumebalk worden gewijzigd.

(12) Reiniging en desinfectie

Voor de Staff Terminal mogen alleen desinfectiemiddelen worden gebruikt, die geen ester of keton als deel of als geheel bevatten. Als desinfectietoepassing mag alleen de veegdesinfectie en in geen enkel geval de doopdesinfectie worden gebruikt.

Als er vanuit gegaan kan worden dat defecte producten gecontamineerd zijn, moeten deze voor het terugsturen voor reparatie conform deze aanwijzing gereinigd en gedesinfecteerd worden.

(13) Bedrijf en onderhoud

Het bedrijf van de licht-oproepinstallatie VISOCALL IP. is onderhevig aan de artikel 9 van de norm DIN VDE0834 deel 1. Wij willen erop wijzen dat wij de andere verplichte periodieke inspecties en onderhoudsbeurten die in dit artikel zijn beschreven, graag in uw opdracht voor u uitvoeren.



SCHRACK SECONET AG

Eibesbrunnnergasse 18

A-1120 Vienna

Tel.: +43-1-81157-0

office@schrack-seconet.com

www.schrack-seconet.com

NL

Czech Rep. • CZ-100 00 Prague 10, V Úžlabině 1490/70 • Tel.: +420-2-74782284

Hungary • HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 • Tel.: +36-1-4644300

India • IN-122002 Gurgaon, DLF Golf Course Road, Sector-54 • Tel.: +91-124-4141501

Poland • PL-02-672 Warsaw, ul. Domaniewska 44a, bud. Platinum V • Tel.: +48-22-33 00 620

Romania • RO-023961 Bucharest, Str. Mântuleasa nr. 15A/1, Sector 2 • Tel.: +40-372 756 316

Russia • RU-129626 Moscow, Ul. Staroalexejevskaja 5 • Tel.: +7-495-510 50 15

Slovakia • SK-83527 Bratislava–Rača, Mudrochova 2 • Tel.: +421-2-44635595

Sweden • SE-145 84 Norsborg, Botvid Business Center • Tel.: +46-8-680 18 60

Turkey • TR-34722 Kadıköy–İstanbul, Kasap İsmail Sk. 5/5 • Tel.: +90-216-345 51 99

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T