




# Terminalul de pat PAT

## Manual de utilizare

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T

## Prezentare generală

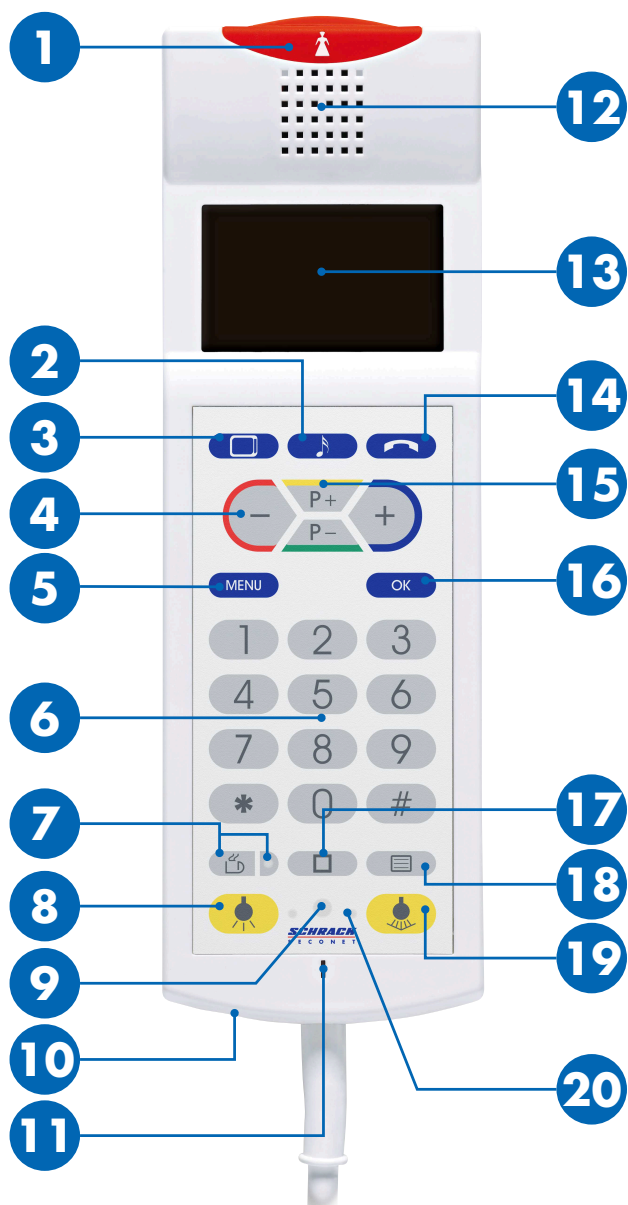

<b>1</b>	<b>Buton apelare asistentă</b>
<b>2</b>	<b>Buton radio</b>
<b>3</b>	<b>Buton TV</b>
<b>4</b>	<b>Butoane -/+</b>
<b>5</b>	<b>Buton meniu</b>
<b>6</b>	<b>Tastatură numerică</b>
<b>7</b>	<b>Buton apel servicii și led de veghe</b>
<b>8</b>	<b>Lumina din cameră</b>
<b>9</b>	<b>Receptor infraroșu (opțional)</b>
<b>10</b>	<b>Mufă căști</b>
<b>11</b>	<b>Microfon</b>
<b>12</b>	<b>Difuzor</b>
<b>13</b>	<b>Ecran</b>
<b>14</b>	<b>Buton telefon</b>
<b>15</b>	<b>Butoane pentru selecția postului</b>
<b>16</b>	<b>Buton confirmare</b>
<b>17</b>	<b>Buton funcție specială</b>
<b>18</b>	<b>Buton teletext</b>
<b>19</b>	<b>Lumina de la pat</b>
<b>20</b>	<b>Ledurile butoanelor pentru lumină (leduri de veghe)</b>



### **PRECAUȚIE**

**Nu folosiți drept ajutor la ridicat**

Cablul și dispozitivul nu sunt ajutoare pentru ridicat. Nu vă ridicați trăgând de dispozitiv.

## Apelul pentru personalul de îngrijire

Butonul de apelare  1 este permanent aprins, astfel că este mai ușor de localizat chiar și în întuneric.

### Apelarea personalului de îngrijire

Apăsați butonul  1.

► Butonul de apelare  1 se aprinde.

### Personalul de îngrijire răspunde

1. Un sunet de gong se aude în difuzor 12 iar butonul de apelare se aprinde intermitent.
2. Folosiți terminalul de pat precum un telefon pentru a discuta cu personalul de îngrijire.
3. Personalul de îngrijire va încheia apelul la terminarea convorbirii.

## Apelul pentru servicii

Ledul butonului este aprins permanent, astfel că este mai ușor de localizat chiar și în întuneric.

Apăsați butonul pentru servicii  7.

► Ledul butonului pentru servicii  7 se aprinde.

Un membru al personalului pentru servicii fie vă va contacta printr-un apel vocal, fie se va deplasa în persoană la Dvs.

## Aprinderea și stingerea luminilor


Ledurile butoanelor pentru lumină 20 sunt permanent aprinse, astfel că butoanele sunt mai ușor de localizat chiar și în întuneric.

### Lumina din cameră (opțional)

Apăsați scurt butonul pentru lumina din cameră  8.

► Lumina din cameră se aprinde ori se stinge.

### Lumina de la pat (opțional)

Apăsați scurt butonul pentru lumina de la pat  19.

► Lumina de la pat se aprinde ori se stinge.

## Funcțiile meniului

### Luminozitatea ecranului

1. Apăsați butonul **MENU** 5.
2. Alegeți funcția **Luminozitate** de pe ecran 13 folosind butoanele pentru selecția postului **P+ / P-** 15.
3. Confirmați cu butonul **OK** 16.
4. Alegeți luminozitatea dorită folosind butoanele **- / +** 4.
5. Pentru a ieși din meniu apăsați din nou butonul **MENU** 5.

### Contrastul ecranului

1. Apăsați butonul **MENU** 5.
2. Alegeți funcția **Contrast** de pe ecran 13 folosind butoanele pentru selecția postului **P+ / P-** 15.
3. Confirmați cu butonul **OK** 16.
4. Alegeți contrastul dorit folosind butoanele **- / +** 4.
5. Pentru a ieși din meniu apăsați din nou butonul **MENU** 5.

### Volumul sonor

1. Apăsați butonul **MENU** 5.
2. Alegeți funcția **Volum sonor** de pe ecran 13 folosind butoanele pentru selecția postului **P+ / P-** 15.
3. Confirmați cu butonul **OK** 16.
4. Alegeți funcția pentru care veți configura volumul sonor folosind butoanele pentru selecția postului **P+ / P-** 15.
5. Alegeți volumul sonor dorit folosind butoanele **- / +** 4.
6. Pentru a ieși din meniu apăsați din nou butonul **MENU** 5.

### Tonul de apel

1. Apăsați butonul **MENU** 5.
2. Alegeți funcția **Ton de apel** de pe ecran 13 folosind butoanele pentru selecția postului **P+ / P-** 15.
3. Confirmați cu butonul **OK** 16.
4. Alegeți tonul de apel dorit folosind butoanele pentru selecția postului **P+ / P-** 15.
5. Pentru a ieși din meniu apăsați din nou butonul **MENU** 5.

# Funcționalități opționale

## Televizorul

### Pornirea și oprirea televizorului

Apăsăți butonul TV  3 pentru a porni sau a opri televizorul.

- ▶ Televizorul este pornit, iar pe ecran este indicat ultimul post urmărit 13.

### Alegerea unui post


Introduceți numărul postului folosind tastatura numerică 6 sau alegeți secvențial un post folosind butoanele **P+ / P-** 15.

### Configurarea sunetului și a volumului sonor

Redarea sunetului se poate face prin difuzor 12 sau căști (mufă jack 10).

Alegeți volumul sonor dorit folosind butoanele **- / +** 4.

### Accesarea teletextului

1. Apăsăți butonul  18 pentru a accesa sau a ieși din modul teletext.
2. Introduceți numărul paginii folosind tastatura numerică 6 sau schimbați pagina folosind butoanele **P+ / P-** 15.

## Radioul

### Pornirea și oprirea radioului

Apăsăți butonul radio  2 pentru a porni sau a opri radioul.

- ▶ Radioul este pornit, iar pe ecran este indicat ultimul post ascultat 13.

### Alegerea unui post

Introduceți numărul postului folosind tastatura numerică 6 sau alegeți secvențial un post folosind butoanele **P+ / P-** 15.



### Configurarea sunetului și a volumului sonor

Redarea sunetului se poate face prin difuzor 12 sau căști (mufă jack 10).



Alegeți volumul sonor dorit folosind butoanele **- / +** 4.

## Telefonul



### Preluarea unui apel telefonic

1. Preluăți un apel telefonic apăsând butonul  14.
2. Alegeți volumul sonor dorit folosind butoanele **- / +** 4.
3. Apăsăți butonul pentru telefon  14 pentru a încheia apelul la terminarea convorbirii.


### Efectuarea unui apel telefonic

1. Apăsăți butonul pentru telefon  14.
2. Apăsăți tasta numerică pentru obținerea unei linii telefonice de exterior (de obicei 0, verificați cu personalul de îngrijire).
3. Formați numărul dorit folosind tastatura numerică 6.
4. Confirmați cu butonul **OK** 16.
5. Apăsăți butonul pentru telefon  14 pentru a încheia apelul la terminarea convorbirii.

### Ultimul număr format

1. Apăsăți butonul pentru telefon  14.
2. Ultimele 10 numere de telefon apelate sunt afișate pe ecran 13.
3. Alegeți numărul dorit folosind butoanele **- / +** 4.
4. Confirmați cu butonul **OK** 16.
5. Apăsăți butonul pentru telefon  14 pentru a încheia apelul la terminarea convorbirii.

## Controlul jaluzelelor

1. Apăsăți butonul pentru funcții speciale  17.
2. Alegeți **J aluzele** de pe ecran 13 folosind butoanele pentru selecția postului **P+ / P-** 15.
3. Deschideți sau închideți jaluzelele folosind butoanele **- / +** 4.

## Receptorul infraroșu

Receptorul infraroșu este folosit pentru controlul terminalului de pat prin comenzi de la dispozitivele ajutoare de control.



SCHRACK SECONET AG  
Eibesbrunnnergasse 18  
A-1120 Vienna  
Tel. +43 1 81157  
office@schrack-seconet.com  
www.schrack-seconet.com

RO

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
SECONET