




Potilaspäätte PAT-L

Käyttöopas

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

Yleiskuvaus

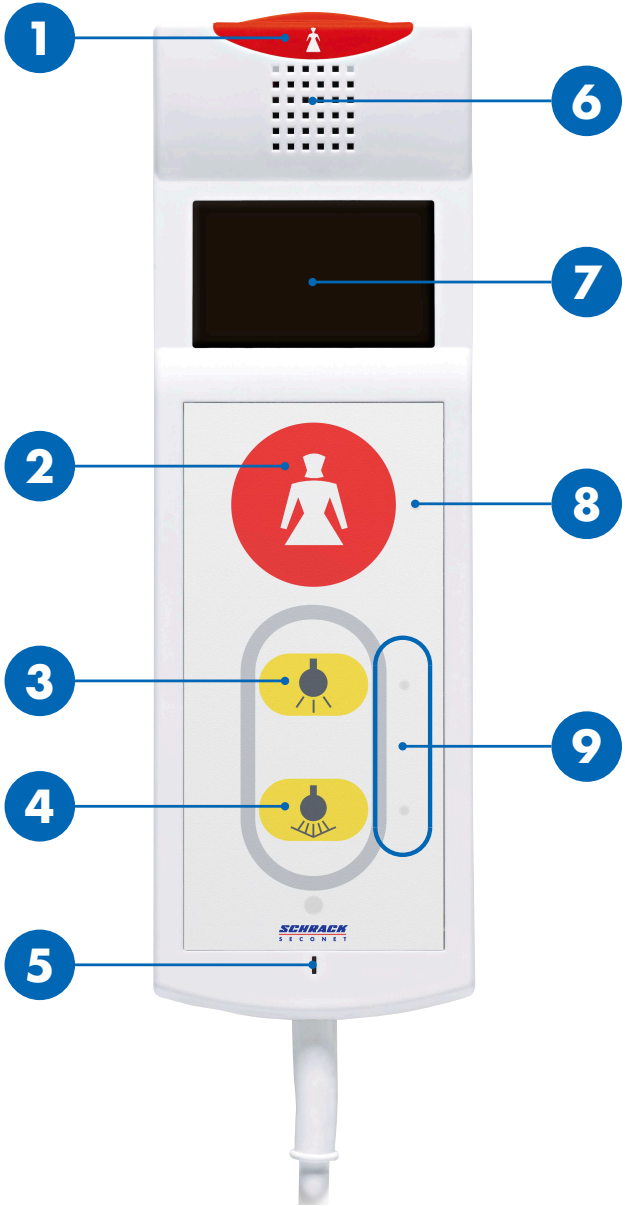

1 / 2	Kutsupainikkeet
3	Huonevalo
4	Lukuvalo
5	Mikrofoni
6	Kaiutin
7	Näyttö
8	Kutsupainikkeen LED-valo (varmistusvalo)
9	Valopainikkeen LED-valo (apuväli)



HUOMIO

Ei saa käyttää nousutukena

Johto ja laite eivät ole nousutukia. Älä vedä itseäsi ylös laitteen avulla.

Hoitajakutsu

Kutsupainike  **1** ja LED-valo **8** palavat jatkuvasti, jotta painikkeet on helpompi nähdä myös pimeässä.

Hoitajan kutsuminen

Paina kutsupainiketta  **1** tai **2**.

- Kutsupainike  **1** ja LED-valo **8** syttyvät.

Hoitaja vastaa

1. Merkkiäänä kuuluu kaiuttimesta **6** ja kutsupainike/LED-valo vilkkuu.
2. Puhu hoitajan kanssa käyttämällä potilaspäätettä puhelimen tavoin.
3. Hoitaja katkaisee puhelun sen päättyttyä.

Valon sytyttäminen ja sammuttaminen

Valopainikkeiden LED-valot **9** palavat jatkuvasti, jotta painikkeet on helpompi nähdä myös pimeässä.

Huonevalo (valinnainen)

Paina huonevalon painiketta  **3** lyhyesti.

- Huonevalo syttyy tai sammuu.

Lukuvalo (valinnainen)

Paina lukuvalon painiketta  **4** lyhyesti.

- Lukuvalo syttyy tai sammuu.



FI

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T