



**SCHRACK SECONET AG**  
**Eibesbrunnergasse 18**  
**A-1120 Vienna**  
**Tel. +43 1 81157**  
**office@schrack-seconet.com**  
**www.schrack-seconet.com**

HE

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
SECONET

לחצני קריאה	2 / 1
תאורת חדר	3
תאורת קריאה	4
LED של לחצן קריאה (תאורת הרגעה)	5
LED של כפתור תאורה (תאורת גילוי)	6

## זהירות

אסור להשתמש בעזר לטיפוס



הכבל והמכשיר אינם עזר לטיפוס. אל תמשוך את עצמך מעלה ע"י שימוש במכשיר.

### 1.1 קריאה לצוות סיוע

לחצן הקריאה a 1 וה-LED 5 מוארים באופן תמידי, כדי שיהיה ניתן למצוא את מיקומם של הלחצנים גם בחושך, בקלות רבה יותר.

#### 1.1.1 יצירת קשר עם צוות הסיוע

לחץ על לחצן הקריאה a 1 או 2. לחצן קריאה a 1 ו-LED 5 נדלקים.

### 1.2 כיבוי והדלקה של התאורה

ה-LED של כפתורי התאורה 6 מוארים באופן תמידי, כדי שיהיה ניתן למצוא את מיקומם של הכפתורים גם בחושך, בקלות רבה יותר.

#### 1.2.1 תאורת חדר (אופציונלי)

לחץ על כפתור תאורת החדר b 3 לחיצה קצרה.


לחץ על כפתור תאורת החדר b 3 לחיצה נכבית.

#### 1.2.2 תאורת קריאה (אופציונלי)

לחץ על כפתור תאורת החדר c 4 לחיצה קצרה.

לחץ על כפתור תאורת החדר c 4 לחיצה נכבית.

# 1 סקירה כללית

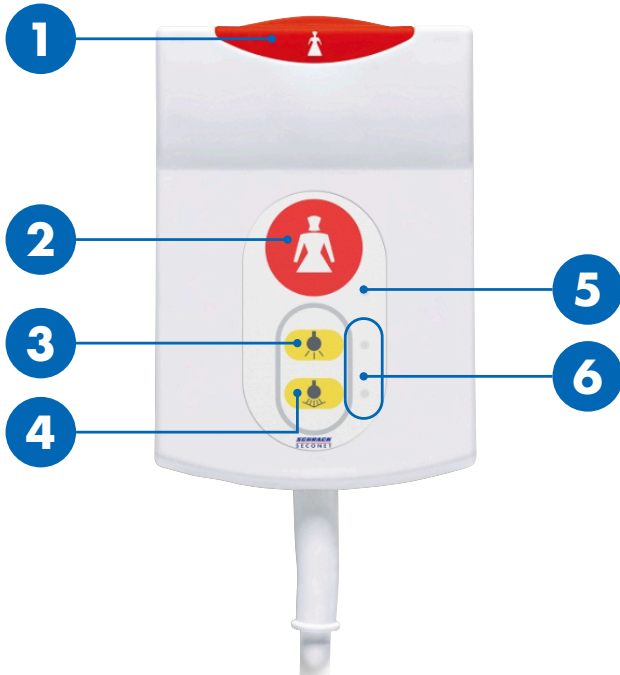



# לחצן מצוקה BT-B

מדריך למשתמש

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T