




# Bumbierveida spiedpoga BT-B

Lietotāja rokasgrāmata

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T

# Pārskats

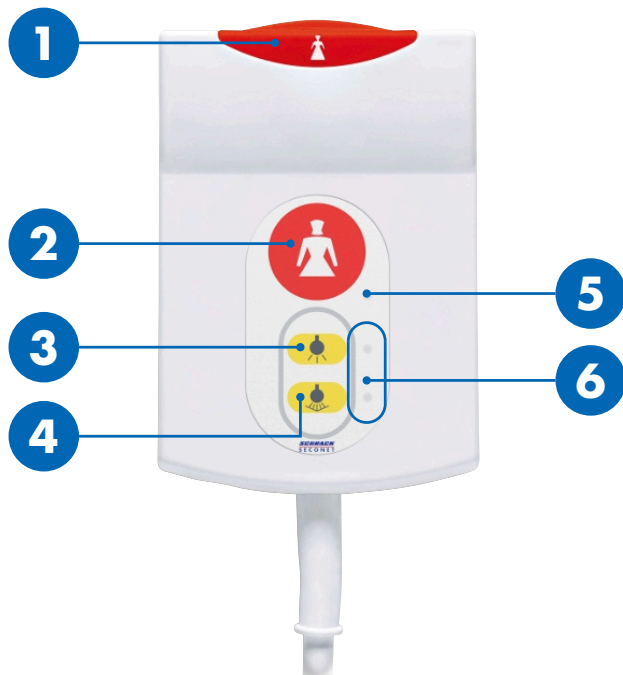

<b>1 / 2</b>	<b>Izsaukuma pogas</b>
<b>3</b>	<b>Telpas apgaismojums</b>
<b>4</b>	<b>Lasišanas gaisma</b>
<b>5</b>	<b>Izsaukuma pogas gaismas diode (atbalsta gaisma)</b>
<b>6</b>	<b>Gaismas pogas LED (meklēšanas gaisma)</b>




## UZMANĪBU


### Neizmantot kā piecelšanās palīgīdzekli

Kabelis un ierīce nav piecelšanās palīgīdzekļi. Nepievelciet sevi, izmantojot ierīci.

## Aprūpes personāla izsaukšana

Izsaukuma poga  **1** un LED **5** ir pastāvīgi iedegti, lai pogas varētu vieglāk atrast pat tumsā.

### Kā izsaukt aprūpes personālu


Nospiediet izsaukuma pogu  **1** vai **2**.

- Izsaukuma poga  **1** un LED **5** iedegas.

## Gaismas ieslēgšana un izslēgšana

Gaismas pogu **6** LED ir pastāvīgi iedegtas, lai pogas varētu vieglāk atrast pat tumsā.

### Telpas apgaismojums (papildaprīkojums)

Uz īsu brīdi nospiediet telpas apgaismojuma pogu  **3**.

- Telpas apgaismojums tiek ieslēgts vai izslēgts.

### Lasišanas gaisma (papildaprīkojums)

Uz īsu brīdi nospiediet lasišanas gaismas pogu  **4**.

- Lasišanas gaisma tiek ieslēgta vai izslēgta.



LV

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T