




Potilaspääte PAT-E

Käyttöopas

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

Yleiskuvaus

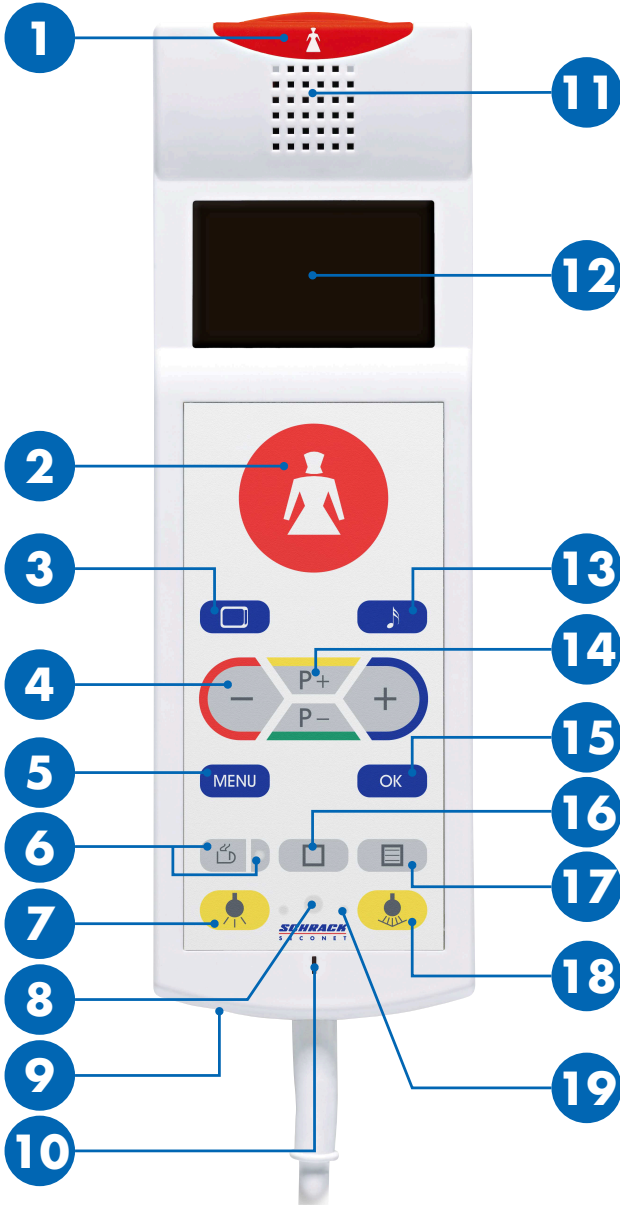

| | |
|--------------|--|
| 1 / 2 | Kutsupainikkeet |
| 3 | TV-painike |
| 4 | -/+ -painike |
| 5 | Valikkopainike |
| 6 | Palvelukutsupainike ja LED-valo (apuväli) |
| 7 | Huoneväli |
| 8 | Infrapunaavastaaotin (valinnainen) |
| 9 | Kuulokeliitäntä |
| 10 | Mikrofoni |
| 11 | Kaiutin |
| 12 | Näyttö |
| 13 | Radio-painike |
| 14 | Ohjelman valintapainikkeet |
| 15 | Vahvistuspainike |
| 16 | Erityistoimintopainike |
| 17 | Teksti-TV-painike |
| 18 | Lukuväli |
| 19 | Valopainikkeen LED-valo (apuväli) |




HUOMIO

Ei saa käyttää nousutukena

Johto ja väli eivät ole nousutukia. Älä vedä itseäsi ylös välin avulla.

Hoitajakutsu


Kutsupainike  1 palaa jatkuvasti, jotta se on helpompi nähdä myös pimeässä.

Hoitajan kutsuminen

Paina kutsupainiketta  1 tai  2.

► Kutsupainikkeen merkkivalo  1 syttyy.


Hoitaja vastaa

1. Merkkiääni kuuluu kaiuttimesta  11 ja kutsupainikkeen merkkivalo vilkkuu.
2. Puhu hoitajan kanssa käyttämällä potilaspäätettä puhelimen tavoin.
3. Hoitaja katkaiseen puhelun sen päätyttyä.

Huoltokutsu


Painikkeen LED-valo palaa jatkuvasti, jotta se on helpompi nähdä myös pimeässä.

Paina huoltokutsupainiketta  6.


► Huoltokutsupainikkeen LED-valo  6 syttyy.

Huoltohenkilö joko soittaa takaisin laitteeseen tai saapuu luoksesi.

Valon sytyttäminen ja sammuttaminen

Valopainikkeiden LED-valot  19 palavat jatkuvasti, jotta painikkeet on helpompi nähdä myös pimeässä.

Huonevalo (valinnainen)

Paina huonevalon painiketta  7 lyhyesti.

► Huonevalo syttyy tai sammuu.







Lukuvalo (valinnainen)

Paina lukuvalon painiketta  18 lyhyesti.







► Lukuvalo syttyy tai sammuu.

Valikkotoiminnot








Näytön kirkkauden säätäminen

1. Paina **MENU** (Valikko) -painiketta  5.
2. Valitse **Brightness** (Kirkkaus) näytössä  12 käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+** / **P-**  14.
3. Vahvista painamalla **OK**-painiketta  15.
4. Säädä kirkkaus haluamallesi tasolle **-/+**-painikkeilla  4.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU** (Valikko) -painiketta  5.

Näytön kontrastin säätäminen

1. Paina **MENU** (Valikko) -painiketta  5.
2. Valitse **Contrasti** (Kontrasti) näytössä  12 käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+** / **P-**  14.
3. Vahvista painamalla **OK**-painiketta  15.
4. Säädä kontrasti haluamallesi tasolle **-/+**-painikkeilla  4.
5. Poistu valikosta painamalla **MENU** (Valikko) -painiketta  5.


Äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Paina **MENU** (Valikko) -painiketta  5.
2. Valitse **Volume** (Äänenvoimakkuus) näytössä  12 käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+** / **P-**  14.
3. Vahvista painamalla **OK**-painiketta  15.
4. Valitse toiminto, jonka äänenvoimakkuutta haluat säätää, käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+** / **P-**  14.
5. Säädä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle **-/+**-painikkeilla  4.
6. Poistu valikosta painamalla **MENU** (Valikko) -painiketta  5.

Lisätoiminnot

TV

Television kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke televisio päälle tai pois päältä painamalla TV-painiketta  3.

- ▶ Televisio kytkeytyy päälle, ja ilmoitus viimeksi katsellusta kanavasta näkyy näytöllä 12.

Kanavan valinta


Vaihda kanavaa kanavan valintapainikkeilla **P+ / P-** 14.

Äänen ja äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänen ulostulo kaiuttimesta 11 tai kuulokkeista (kuulokeliitäntä 9).

Säädä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle **- / +**-painikkeilla 4.

Tekstitelevisio

1. Siirry teksti-TV-tilaan tai poistu siitä painamalla teksti-TV-painiketta  17.
2. Siirry seuraavalle sivulle ohjelman valintapainikkeilla **P+ / P-** 14.

Radio

Radion kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke radio päälle tai pois päältä painamalla radio-painiketta  13.

- ▶ Radio kytkeytyy päälle, ja ilmoitus viimeksi kuunnellusta kanavasta näkyy näytöllä 12.

Kanavan valinta


Vaihda kanavaa kanavan valintapainikkeilla **P+ / P-** 14.

Äänen ja äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänen ulostulo kaiuttimesta 11 tai kuulokkeista (kuulokeliitäntä 9).

Säädä äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle **- / +**-painikkeilla 4.

Verhojen säätäminen

1. Paina erityistoimintojen painiketta  16.
2. Valitse **Blinds** (Verhot) näytössä 12 käyttämällä ohjelman valintapainikkeita **P+ / P-** 14.
3. Avaa tai sulje verhot **- / +**-painikkeella 4.

Infrapunavastaanotin

Potilaspäätettä etäohjataan ohjauslaitteilla infrapunavastaanottimen avulla.



FI

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T