




Pacientský terminál PAT-E

Uživatelská příručka

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

Přehled

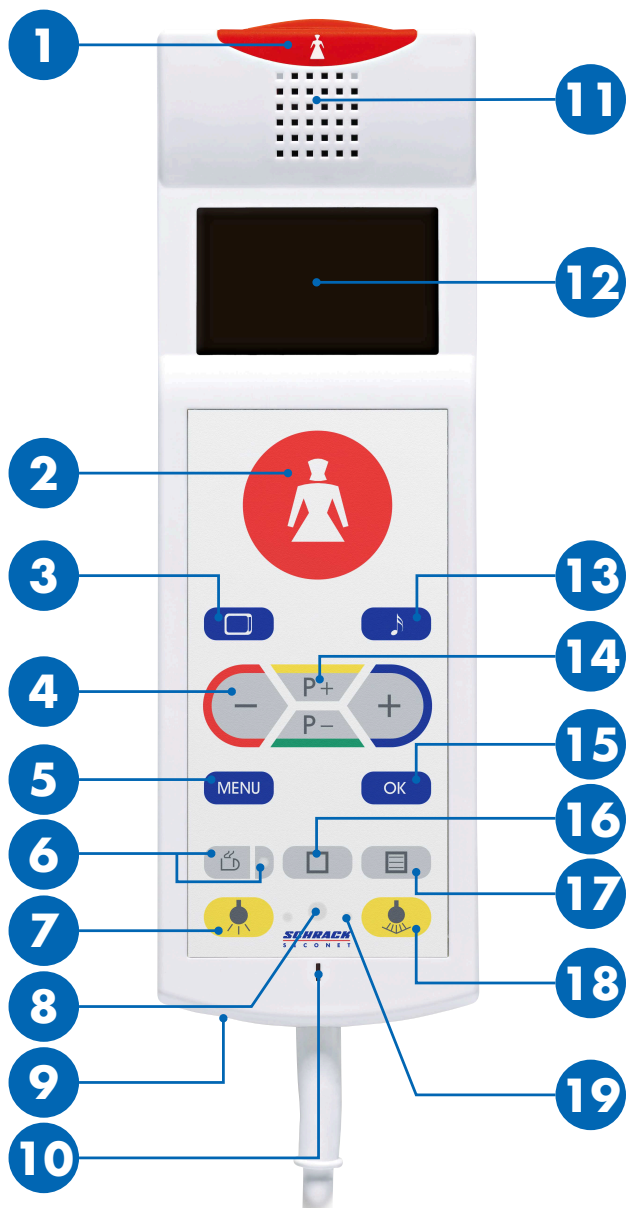

1 / 2	Nouzová přivolávací tlačítka
3	Tlačítko TV
4	-/+ tlačítko
5	Tlačítko menu
6	Tlačítko pro přivolání pomocného personálu s LED diodou (pro snazší nalezení ve tmě)
7	Pokojevé světlo
8	Infračervený přijímač (volitelné)
9	Připojení sluchátek
10	Mikrofon
11	Reproduktor (sluchátko)
12	Displej
13	Tlačítko rádia
14	Tlačítka pro výběr programu
15	Potvrzovací tlačítko
16	Tlačítko speciální funkce
17	Tlačítko teletextu
18	Lůžkové světlo
19	LED dioda ovládání světel (pro snazší nalezení ve tmě)




UPOZORNĚNÍ

Neslouží jako pomůcka pro zvedání


Kabel ani zařízení nepředstavují pomůcku pro zvedání. Nepoužívejte zařízení jako pomůcku pro zvednutí.

Přivolání ošetřujícího personálu

Nouzové přivolávací tlačítko  1 je trvale rozsvíceno, díky tomu jej lze snadno najít i ve tmě.

Přivolat ošetřující personál

Stiskněte nouzové přivolávací tlačítko  1 nebo 2.


- ▶ Nouzové přivolávací tlačítko  1 se rozsvítí.


Reakce ošetřujícího personálu

1. Z reproduktoru se ozve gong 11 a LED dioda přivolávacího tlačítka začne blikat.
2. K rozhovoru s ošetřujícím personálem použijte patientský terminál jako telefon.
3. Na konci rozhovoru ošetřující personál hovor ukončí.

Přivolání pomocného personálu

LED dioda tlačítek je trvale rozsvícena, díky tomu lze tlačítka snadno najít i ve tmě.

Stiskněte tlačítko pro přivolání pomocného personálu  6.


- ▶ LED dioda  6 vedle tlačítka pro přivolání pomocného personálu se rozsvítí.

Pomocný personál s Vámi může komunikovat prostřednictvím reproduktoru nebo přijít osobně.

Zapnutí a vypnutí světla


LED diody ovládání lůžkových světel 19 jsou trvale rozsvíceny, díky tomu lze tlačítka snadno najít i ve tmě.

Ovládání pokojového světla (volitelné)

Stiskněte krátce tlačítko ovládání pokojového světla  7.

- ▶ Světlo se střídavě zapne nebo vypne.

Ovládání lůžkového světla (volitelné)

Stiskněte krátce tlačítko ovládání lůžkového světla  18.

- ▶ Světlo se střídavě zapne nebo vypne.

Funkce menu

Nastavení jasu

1. Stiskněte tlačítko **MENU** 5.
2. Vyberte **Jas** na displeji 12 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 14.
3. Potvrďte tlačítkem **OK** 15.
4. Nastavte požadovaný jas pomocí **- / +** tlačítek 4.
5. Pro opuštění nabídky menu stiskněte tlačítko **MENU** 5.

Nastavení kontrastu

1. Stiskněte tlačítko **MENU** 5.
2. Vyberte **Kontrast** na displeji 12 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 14.
3. Potvrďte tlačítkem **OK** 15.
4. Nastavte požadovaný kontrast pomocí **- / +** tlačítek 4.
5. Pro opuštění nabídky menu stiskněte tlačítko **MENU** 5.

Nastavení hlasitosti

1. Stiskněte tlačítko **MENU** 5.
2. Vyberte **Hlasitost** na displeji 12 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 14.
3. Potvrďte tlačítkem **OK** 15.
4. Pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 14, vyberte funkci, pro kterou funkci má být hlasitost nastavena.
5. Nastavte požadovanou hlasitost pomocí **- / +** tlačítek 4.
6. Pro opuštění nabídky menu stiskněte tlačítko **MENU** 5.

Volitelné funkce

Televizor

Zapnutí a vypnutí televizoru

Stisknutím TV tlačítka  3 zapnete nebo vypnete televizor.

- Televizor je zapnutý a na displeji se zobrazí poslední zvolený kanál 12.

Výběr kanálu


Pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 14, přepněte na další kanál.

Nastavení zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup přes reproduktor 11 nebo připojená sluchátka (přípojovací konektor 9).


Nastavte požadovanou hlasitost pomocí **-/+** tlačítek 4.

Vyvolání teletextu

1. Stisknutím tlačítka teletext  17 vyvoláte nebo opustíte režim teletextu.
2. Pomocí tlačítek **P+ / P-** 14 pro výběr programu přepněte na další stránku.

Rádio

Vypnutí a zapnutí rádia

Stisknutím tlačítka rádia  13 zapnete nebo vypnete rádio.

- Rádio se zapne a na displeji 12 se zobrazí poslední zvolený kanál rádia.

Výběr kanálu


Pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 14, přepněte na další kanál.

Nastavení zvuku a hlasitosti

Zvukový výstup přes reproduktor 11 nebo připojená sluchátka (přípojovací konektor 9).

Nastavte požadovanou hlasitost pomocí **-/+** tlačítek 4.

Ovládání žaluzii

1. Stiskněte tlačítko zvláštních funkcí  16.
2. Vyberte **Žaluzie** na displeji 12 pomocí tlačítek pro výběr programu **P+ / P-** 14.
3. Pomocí **-/+** tlačítek 4 otevřete nebo zavřete žaluzie.

Infračervený přijímač

Infračervený přijímač slouží k dálkovému ovládání pacientského terminálu pomocí kompenzačních zařízení.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

CS

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET