


# Pozivno ručno tipkalo za pacijente BT-IP

---

**Korisnički priručnik**

# Pregled

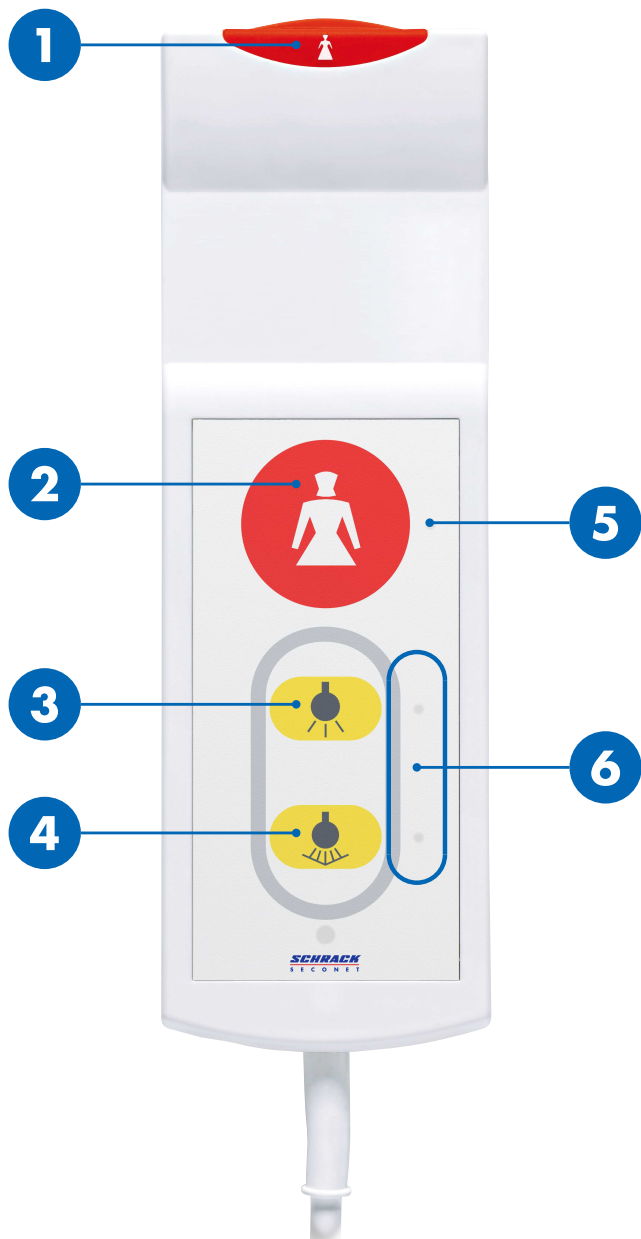

- 1 / 2** Pozivna tipkala
- 3** Sobno svjetlo
- 4** Svjetlo za čitanje
- 5** LED svjetlo pozivnog tipkala
- 6** LED svjetlo za uočavanje



#### **OPREZ**

#### **Ne koristiti kao oslonac pri ustajanju iz kreveta**

Ne koristiti kablove i uređaje kao oslonac pri ustajanju iz kreveta. Nemojte se podizati iz kreveta koristeći uređaje kao oslonac.

## **Poziv medicinskom osoblju**

Pozivna tipka  **1** i LED svjetlo **5** konstantno svijetle radi uočavanja u mraku.

### **Pozivanje medicinskog osoblja**

Pritisnite pozivnu tipku  **1** ili **2**.

- ▶ Pozivna tipka  **1** i LED svjetlo **5** zasvijetli.

## **Uključenje / isključenje svjetla**

LED svjetla **6** konstantno svijetle radi uočavanja u mraku.

### **Sobno svjetlo (opcionalno)**

Kratko pritisnite tipku za sobno svjetlo  **3**.

- ▶ Sobno svjetlo je uključeno / isključeno.

### **Svjetlo za čitanje (opcionalno)**

Kratko pritisnite tipku za svjetlo za čitanje  **4**.

- ▶ Svjetlo za čitanje je uključeno / isključeno.

## **Schrack Seconet AG**

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna  
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

## **schrack-seconet.com**

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199