


Birntaster BT-B

Bedienungsanleitung

Übersicht

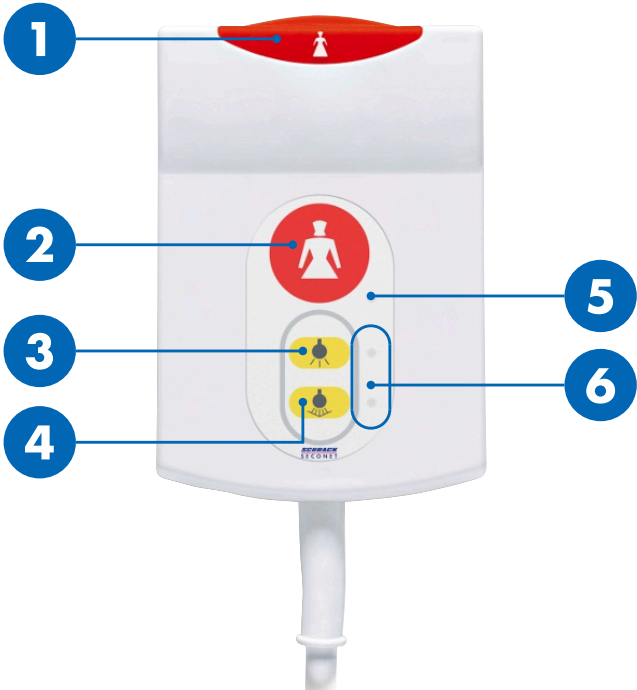

- 1 / 2 Ruftasten
- 3 Raumlicht
- 4 Leselicht
- 5 LED der Ruftaste (Beruhigungslicht)
- 6 LED der Lichttasten (Findelicht)



VORSICHT

Nicht als Aufrichthilfe verwenden

Kabel und Gerät sind keine Aufrichthilfe. Ziehen Sie sich nicht an dem Gerät hoch, um sich aufzurichten.

Pflegepersonalruf

Die Ruftaste  1 und die LED 5 glimmen ständig, damit die Tasten in der Dunkelheit leichter aufzufinden sind.

Pflegepersonal rufen

Ruftaste  1 oder 2 drücken.

- ▶ Ruftaste  1 und LED 5 leuchten auf.

Licht ein- und ausschalten

Die LED der Lichttasten 6 glimmen ständig, damit die Tasten in der Dunkelheit leichter aufzufinden sind.

Raumlicht (optional)

Raumlichttaste  3 kurz drücken.

- ▶ Das Raumlicht wird ein- beziehungsweise ausgeschaltet.

Leselicht (optional)

Leselichttaste  4 kurz drücken.

- ▶ Das Leselicht wird ein- beziehungsweise ausgeschaltet.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Wien

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

[schrack-seconet.com](https://www.schrack-seconet.com)

A-1120 Wien, Eibesbrunnnergasse 18 | +43 50 857-2000

A-4060 Leonding, Dr.-Herbert-Sperl-Ring 3 | +43 50 857-2100

A-5020 Salzburg, Vogelweiderstraße 44a | +43 50 857-2400

A-6020 Innsbruck, Dr.-Franz-Werner-Straße 36 | +43 50 857-2300

A-6850 Dornbirn, Sebastianstraße 13a | +43 50 857-2500

A-8055 Graz, Neuseiersberger Straße 157 | +43 50 857-2200

A-9020 Klagenfurt, Eiskellerstraße 3 | +43 50 857-2600