




# Painike BT-IP

## Käyttöopas

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T

# Yleiskuvaus

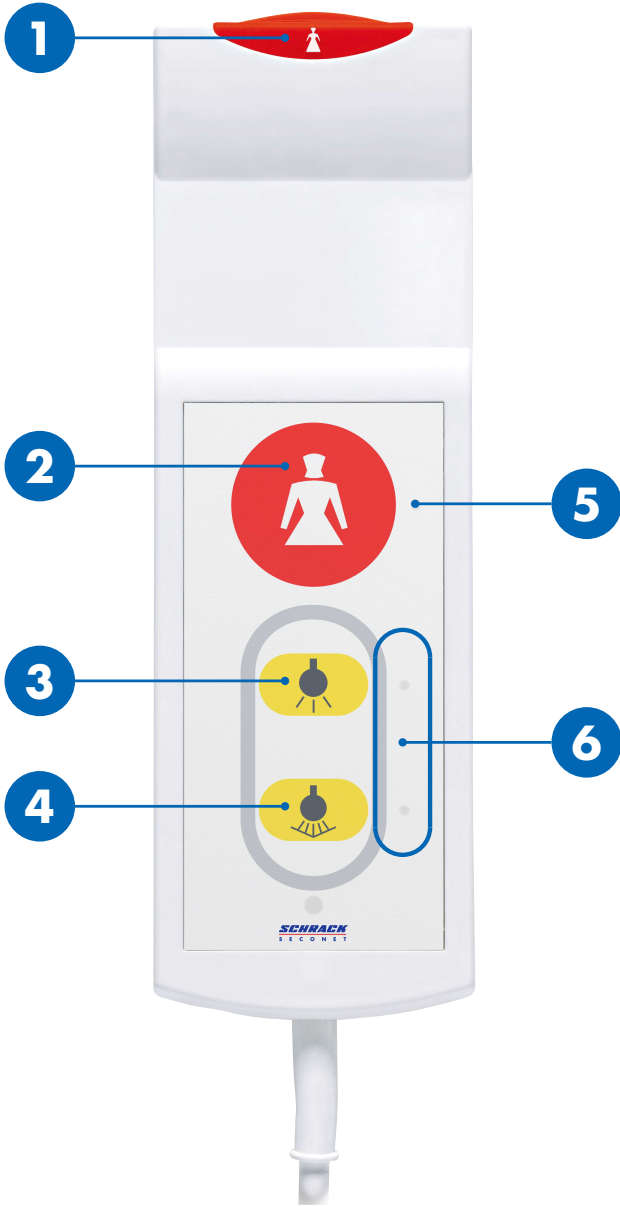

<b>1 / 2</b>	<b>Kutsupainikkeet</b>
<b>3</b>	<b>Huonevalo</b>
<b>4</b>	<b>Lukuvalo</b>
<b>5</b>	<b>Kutsupainikkeen LED-valo (varmistusvalo)</b>
<b>6</b>	<b>Valopainikkeen LED-valo (apuvalo)</b>



## HUOMIO

### Ei saa käyttää nousutukena

Johto ja laite eivät ole nousutukia. Älä vedä itseäsi ylös laitteen avulla.

## Hoitajakutsu

Kutsupainike  **1** ja LED-valo **5** palavat jatkuvasti, jotta painikkeet on helpompi nähdä myös pimeässä.

### Hoitajan kutsuminen


Paina kutsupainiketta  **1** tai **2**.

- ▶ Kutsupainike  **1** ja LED-valo **5** syttyvät.

## Valon sytyttäminen ja sammuttaminen


Valopainikkeiden LED-valot **6** palavat jatkuvasti, jotta painikkeet on helpompi nähdä myös pimeässä.

### Huonevalo (valinnainen)

Paina huonevalon painiketta  **3** lyhyesti.

- ▶ Huonevalo syttyy tai sammuu.

### Lukuvalo (valinnainen)

Paina lukuvalon painiketta  **4** lyhyesti.

- ▶ Lukuvalo syttyy tai sammuu.



FI

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T