



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

HE

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET

לחצני קריאה	2 / 1
תאורת חדר	3
תאורת קריאה	4
מיקרופון	5
רמקול	6
צג	7
LED של לחצן קריאה (תאורת הרגעה)	8
LED של כפתור תאורה (תאורת גילוי)	9

זהירות



אסור להשתמש בעזר לטיפוס

הכבל והמכשיר אינם עזר לטיפוס. אל תמשוך את עצמך מעלה ע"י שימוש במכשיר.

1.2 כיבוי והדלקה של התאורה

ה-LED של כפתורי התאורה 9 מוארים באופן תמידי, כדי שיהיה ניתן למצוא את מיקומם של הכפתורים גם בחושך, בקלות רבה יותר.

1.2.1 תאורת חדר (אופציונלי)

לחץ על כפתור תאורת החדר b 3 לחיצה קצרה.

◀ תאורת החדר נדלקת ונכבית.

1.2.2 תאורת קריאה (אופציונלי)

לחץ על כפתור תאורת החדר c 4 לחיצה קצרה.

◀ תאורת הקריאה נדלקת ונכבית.

1.1 קריאה לצוות סיוע

לחצן הקריאה a 1 וה-LED 8 מוארים באופן תמידי, כדי שיהיה ניתן למצוא את מיקומם של הלחצנים גם בחושך, בקלות רבה יותר.

1.1.1 יצירת קשר עם צוות הסיוע

לחץ על לחצן הקריאה a 1 או 2.

◀ לחצן קריאה a 1 ו-LED 8 נדלקים.


1.1.2 תשובות צוות הסיוע

1. רעשי גונג ברמקול 6 ולחצן קריאה/LED מהבהב.

2. השתמש במסוף המטופל כמו בטלפון כדי לדבר עם צוות הסיוע.

3. צוות הסיוע ינתק את ההתקשרות בסוף השיחה.

1 סקירה כללית

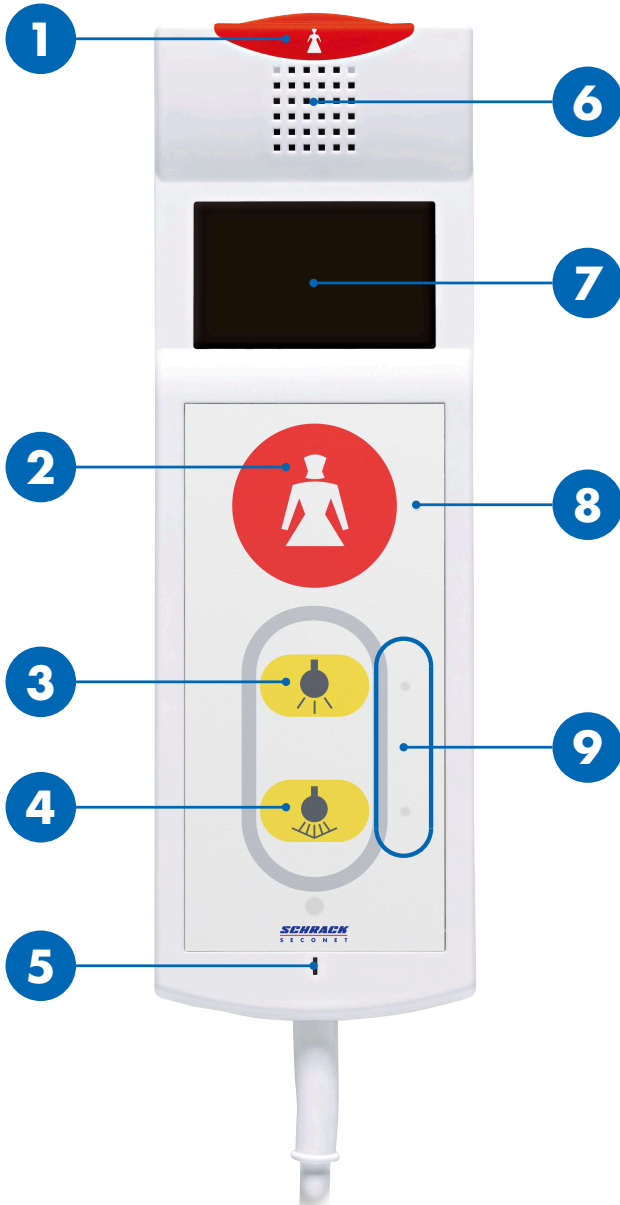



מסוף מטופל PAT-L

מדריך למשתמש

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T