


Terminalul de pat PAT-E

Manual de utilizare

Prezentare generală

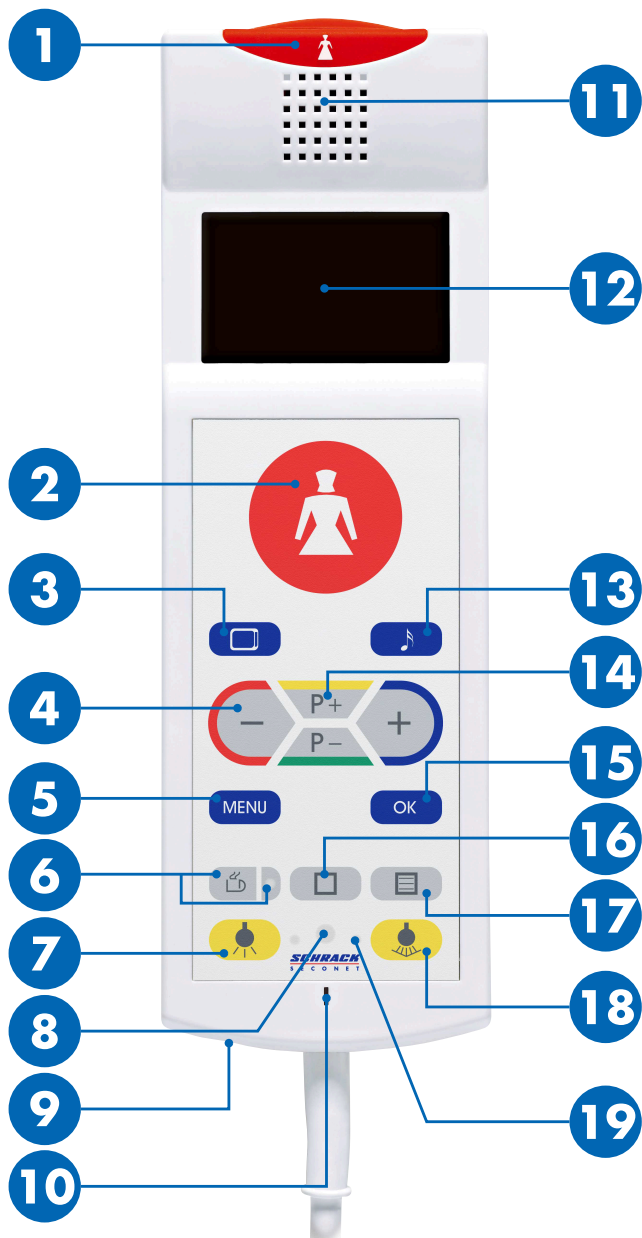

- 1 / 2 Butoane apelare asistentă
- 3 Buton TV
- 4 Butoane -/+
- 5 Buton meniu
- 6 Buton apel servicii și led de veghe
- 7 Lumina din cameră
- 8 Receptor infraroșu (opțional)
- 9 Mufă căști
- 10 Microfon
- 11 Difuzor
- 12 Ecran
- 13 Buton radio
- 14 Butoane pentru selecția postului
- 15 Buton confirmare
- 16 Buton funcție specială
- 17 Buton teletext
- 18 Lumina de la pat
- 19 Ledurile butoanelor pentru lumină (leduri de veghe)



PRECAUȚIE

Nu folosiți drept ajutor la ridicat

Cablul și dispozitivul nu sunt ajutoare pentru ridicat. Nu vă ridicați trăgând de dispozitiv.

Funcționare

Apelul pentru personalul de îngrijire

Butonul de apelare  1 este permanent aprins, astfel că este mai ușor de localizat chiar și în întuneric.

Apelarea personalului de îngrijire

Apăsați butonul de apelare  1 sau 2.

- ▶ Butonul de apelare  1 se aprinde.

Personalul de îngrijire răspunde

1. Un sunet de gong se aude în difuzor 11 iar butonul de apelare se aprinde intermitent.
2. Folosiți terminalul de pat precum un telefon pentru a discuta cu personalul de îngrijire.
3. Personalul de îngrijire va încheia apelul la terminarea convorbirii.

Apelul pentru servicii

Ledul butonului este aprins permanent, astfel că este mai ușor de localizat chiar și în întuneric.

Apăsați butonul pentru servicii  6.

- ▶ Ledul butonului pentru servicii  6 se aprinde.

Un membru al personalului pentru servicii fie vă va contacta printr-un apel vocal, fie se va deplasa în persoană la Dvs.

Aprinderea și stingerea luminilor

Ledurile butoanelor pentru lumină 19 sunt permanent aprinse, astfel că butoanele sunt mai ușor de localizat chiar și în întuneric.

Lumina din cameră (opțional)

Apăsați scurt butonul pentru lumina din cameră  7.

- ▶ Lumina din cameră se aprinde ori se stinge.

Lumina de la pat (opțional)

Apăsați scurt butonul pentru lumina de la pat  18.

- ▶ Lumina de la pat se aprinde ori se stinge.

Funcțiile meniului

Luminozitatea ecranului

1. Apăsați butonul **MENU** 5.
2. Alegeți funcția **Luminozitate** de pe ecran 12 folosind butoanele pentru selecția postului **P+/P-** 14.
3. Confirmați cu butonul **OK** 15.
4. Alegeți luminozitatea dorită folosind butoanele **-/+** 4.
5. Pentru a ieși din meniu apăsați din nou butonul **MENU** 5.

Contrastul ecranului

1. Apăsați butonul **MENU** 5.
2. Alegeți funcția **Contrast** de pe ecran 12 folosind butoanele pentru selecția postului **P+/P-** 14.
3. Confirmați cu butonul **OK** 15.
4. Alegeți contrastul dorit folosind butoanele **-/+** 4.
5. Pentru a ieși din meniu apăsați din nou butonul **MENU** 5.

Volumul sonor

1. Apăsați butonul **MENU** 5.
2. Alegeți funcția **Volum sonor** de pe ecran 12 folosind butoanele pentru selecția postului **P+/P-** 14.
3. Confirmați cu butonul **OK** 15.
4. Alegeți funcția pentru care veți configura volumul sonor folosind butoanele pentru selecția postului **P+/P-** 14.
5. Alegeți volumul sonor dorit folosind butoanele **-/+** 4.
6. Pentru a ieși din meniu apăsați din nou butonul **MENU** 5.

Funcționalități opționale

Televizorul

Pornirea și oprirea televizorului

Apăsăți butonul TV  **3** pentru a porni sau a opri televizorul.

- ▶ Televizorul este pornit, iar pe ecran este indicat ultimul post urmărit **12**.

Alegerea unui post


Schimbați canalul folosind butoanele pentru selecția postului **P+/P-** **14**.

Configurarea sunetului și a volumului sonor

Redarea sunetului se poate face prin difuzor **11** sau căști (mufă jack **9**).

Alegeți volumul sonor dorit folosind butoanele **-/+** **4**.

Accesarea teletextului

1. Apăsăți butonul  **17** pentru a accesa sau a ieși din modul teletext.
2. Schimbați pagina folosind butoanele pentru selecția postului **P+/P-** **14**.

Radioul

Pornirea și oprirea radioului

Apăsăți butonul radio  **13** pentru a porni sau a opri radioul.

- ▶ Radioul este pornit, iar pe ecran este indicat ultimul post ascultat **12**.

Alegerea unui post


Schimbați canalul folosind butoanele pentru selecția postului **P+/P-** **14**.

Configurarea sunetului și a volumului sonor

Redarea sunetului se poate face prin difuzor **11** sau căști (mufă jack **9**).

Alegeți volumul sonor dorit folosind butoanele **-/+** **4**.

Controlul jaluzelelor

1. Apăsăți butonul pentru funcții speciale  **16**.
2. Alegeți **Jaluzele** de pe ecran **12** folosind butoanele pentru selecția postului **P+/P-** **14**.
3. Deschideți sau închideți jaluzelele folosind butoanele **-/+** **4**.

Receptorul infraroșu

Receptorul infraroșu este folosit pentru controlul terminalului de pat prin comenzi de la dispozitivele ajutoare de control.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

[schrack-seconet.com](https://www.schrack-seconet.com)

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199