


# Terminalul de pat PAT

---

**Manual de utilizare**

Prezentare generală

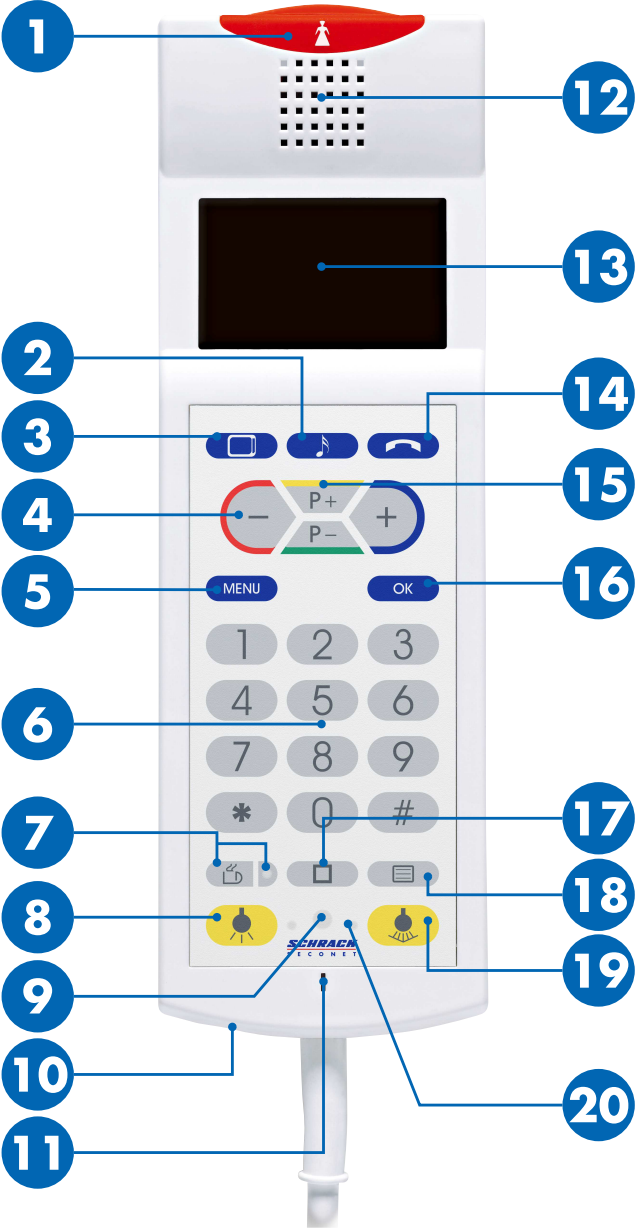

- 1 Buton apelare asistentă
- 2 Buton radio
- 3 Buton TV
- 4 Butoane -/+
- 5 Buton meniu
- 6 Tastatură numerică
- 7 Buton apel servicii și led de veghe
- 8 Lumina din cameră
- 9 Receptor infraroșu (opțional)
- 10 Mufă căști
- 11 Microfon
- 12 Difuzor
- 13 Ecran
- 14 Buton telefon
- 15 Butoane pentru selecția postului
- 16 Buton confirmare
- 17 Buton funcție specială
- 18 Buton teletext
- 19 Lumina de la pat
- 20 Ledurile butoanelor pentru lumină (leduri de veghe)



#### **PRECAUȚIE**

##### **Nu folosiți drept ajutor la ridicat**

Cablul și dispozitivul nu sunt ajutoare pentru ridicat. Nu vă ridicați trăgând de dispozitiv.

# Funcționare

## Apelul pentru personalul de îngrijire

Butonul de apelare  **1** este permanent aprins, astfel că este mai ușor de localizat chiar și în întuneric.

### Apelarea personalului de îngrijire

Apăsați butonul  **1**.

- ▶ Butonul de apelare  **1** se aprinde.

### Personalul de îngrijire răspunde

1. Un sunet de gong se aude în difuzor **12** iar butonul de apelare se aprinde intermitent.
2. Folosiți terminalul de pat precum un telefon pentru a discuta cu personalul de îngrijire.
3. Personalul de îngrijire va încheia apelul la terminarea convorbirii.

## Apelul pentru servicii

Ledul butonului este aprins permanent, astfel că este mai ușor de localizat chiar și în întuneric.

Apăsați butonul pentru servicii  **7**.

- ▶ Ledul butonului pentru servicii  **7** se aprinde.

Un membru al personalului pentru servicii fie vă va contacta printr-un apel vocal, fie se va deplasa în persoană la Dvs.

## Aprinderea și stingerea luminilor

Ledurile butoanelor pentru lumină **20** sunt permanent aprinse, astfel că butoanele sunt mai ușor de localizat chiar și în întuneric.

### Lumina din cameră (opțional)

Apăsați scurt butonul pentru lumina din cameră  **8**.

- ▶ Lumina din cameră se aprinde ori se stinge.

### Lumina de la pat (opțional)

Apăsați scurt butonul pentru lumina de la pat  **19**.

- ▶ Lumina de la pat se aprinde ori se stinge.

# Funcțiile meniului

## Luminozitatea ecranului

1. Apăsați butonul **MENU** **5**.
2. Alegeți funcția **Luminozitate** de pe ecran **13** folosind butoanele pentru selecția postului **P+/P-** **15**.
3. Confirmați cu butonul **OK** **16**.
4. Alegeți luminozitatea dorită folosind butoanele **-/+** **4**.
5. Pentru a ieși din meniu apăsați din nou butonul **MENU** **5**.

## Contrastul ecranului

1. Apăsați butonul **MENU** **5**.
2. Alegeți funcția **Contrast** de pe ecran **13** folosind butoanele pentru selecția postului **P+/P-** **15**.
3. Confirmați cu butonul **OK** **16**.
4. Alegeți contrastul dorit folosind butoanele **-/+** **4**.
5. Pentru a ieși din meniu apăsați din nou butonul **MENU** **5**.

## Volumul sonor

1. Apăsați butonul **MENU** **5**.
2. Alegeți funcția **Volum sonor** de pe ecran **13** folosind butoanele pentru selecția postului **P+/P-** **15**.
3. Confirmați cu butonul **OK** **16**.
4. Alegeți funcția pentru care veți configura volumul sonor folosind butoanele pentru selecția postului **P+/P-** **15**.
5. Alegeți volumul sonor dorit folosind butoanele **-/+** **4**.
6. Pentru a ieși din meniu apăsați din nou butonul **MENU** **5**.

## Tonul de apel

1. Apăsați butonul **MENU** **5**.
2. Alegeți funcția **Ton de apel** de pe ecran **13** folosind butoanele pentru selecția postului **P+/P-** **15**.
3. Confirmați cu butonul **OK** **16**.
4. Alegeți tonul de apel dorit folosind butoanele pentru selecția postului **P+/P-** **15**.
5. Pentru a ieși din meniu apăsați din nou butonul **MENU** **5**.

# Funcționalități opționale

## Televizorul

### Pornirea și oprirea televizorului

Apăsați butonul TV  <sup>3</sup> pentru a porni sau a opri televizorul.

- ▶ Televizorul este pornit, iar pe ecran este indicat ultimul post urmărit <sup>13</sup>.

### Alegerea unui post

Introduceți numărul postului folosind tastatura numerică <sup>6</sup> sau alegeți secvențial un post folosind butoanele **P+/P-** <sup>15</sup>.

### Configurarea sunetului și a volumului sonor

Redarea sunetului se poate face prin difuzor <sup>12</sup> sau căști (mufă jack <sup>10</sup>).

Alegeți volumul sonor dorit folosind butoanele **-/+** <sup>4</sup>.

### Accesarea teletextului

1. Apăsați butonul  <sup>18</sup> pentru a accesa sau a ieși din modul teletext.
2. Introduceți numărul paginii folosind tastatura numerică <sup>6</sup> sau schimbați pagina folosind butoanele **P+/P-** <sup>15</sup>.

## Radioul

### Pornirea și oprirea radioului

Apăsați butonul radio  <sup>2</sup> pentru a porni sau a opri radioul.

- ▶ Radioul este pornit, iar pe ecran este indicat ultimul post ascultat <sup>13</sup>.

### Alegerea unui post

Introduceți numărul postului folosind tastatura numerică <sup>6</sup> sau alegeți secvențial un post folosind butoanele **P+/P-** <sup>15</sup>.

### Configurarea sunetului și a volumului sonor

Redarea sunetului se poate face prin difuzor <sup>12</sup> sau căști (mufă jack <sup>10</sup>).

Alegeți volumul sonor dorit folosind butoanele **-/+** <sup>4</sup>.

## Telefonul

### Preluarea unui apel telefonic

1. Preluati un apel telefonic apăsând butonul  <sup>14</sup>.
2. Alegeți volumul sonor dorit folosind butoanele **-/+** <sup>4</sup>.
3. Apăsați butonul pentru telefon  <sup>14</sup> pentru a încheia apelul la terminarea convorbirii.

### Efectuarea unui apel telefonic

1. Apăsați butonul pentru telefon  <sup>14</sup>.
2. Apăsați tasta numerică pentru obținerea unei linii telefonice de exterior (de obicei 0, verificați cu personalul de îngrijire).
3. Formați numărul dorit folosind tastatura numerică <sup>6</sup>.
4. Confirmați cu butonul **OK** <sup>16</sup>.
5. Apăsați butonul pentru telefon  <sup>14</sup> pentru a încheia apelul la terminarea convorbirii.

### Ultimul număr format

1. Apăsați butonul pentru telefon  <sup>14</sup>.
2. Ultimele 10 numere de telefon apelate sunt afișate pe ecran <sup>15</sup>.
3. Alegeți numărul dorit folosind butoanele **-/+** <sup>4</sup>.
4. Confirmați cu butonul **OK** <sup>16</sup>.
5. Apăsați butonul pentru telefon  <sup>14</sup> pentru a încheia apelul la terminarea convorbirii.

## Controlul jaluzelelor

1. Apăsați butonul pentru funcții speciale  <sup>17</sup>.
2. Alegeți **Jaluzele** de pe ecran <sup>13</sup> folosind butoanele pentru selecția postului **P+/P-** <sup>15</sup>.
3. Deschideți sau închideți jaluzelele folosind butoanele **-/+** <sup>4</sup>.

## Receptorul infraroșu

Receptorul infraroșu este folosit pentru controlul terminalului de pat prin comenzi de la dispozitivele ajutoare de control.

## **Schrack Seconet AG**

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | [office@schrack-seconet.com](mailto:office@schrack-seconet.com)

## **[schrack-seconet.com](http://schrack-seconet.com)**

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199