


Patiententerminal PAT-E

Bedienungsanleitung

Übersicht

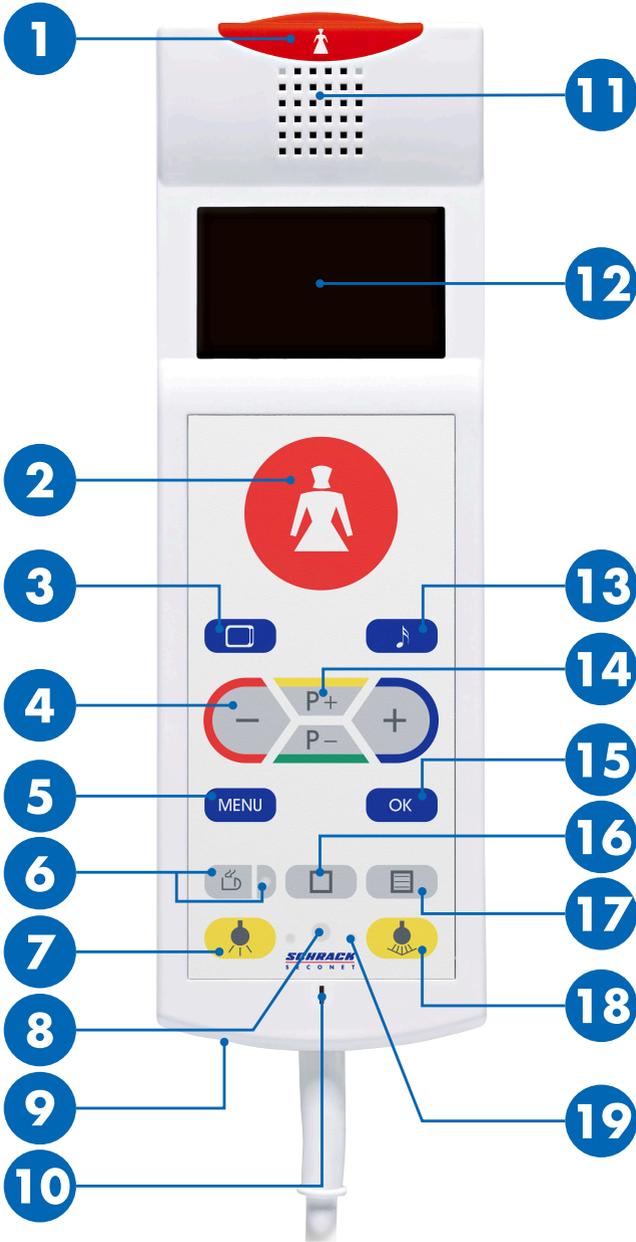

- 1 / 2 Ruftasten
- 3 TV-Taste
- 4 +/--Tasten
- 5 Menütaste
- 6 Serviceruftaste mit LED (Findelicht)
- 7 Raumlicht
- 8 Infrarotempfänger (optional)
- 9 Kopfhöreranschluss
- 10 Mikrofon
- 11 Lautsprecher
- 12 Display
- 13 Radiotaste
- 14 Programmwahltasten
- 15 Bestätigungstaste (OK-Taste)
- 16 Sonderfunktionstaste
- 17 Videotexttaste
- 18 Leselicht
- 19 LED der Lichttasten (Findelicht)



VORSICHT

Nicht als Aufrichthilfe verwenden

Kabel und Gerät sind keine Aufrichthilfe. Ziehen Sie sich nicht an dem Gerät hoch, um sich aufzurichten.

Bedienung

Pflegepersonalruf

Die Ruftaste  **1** glimmt ständig, damit sie in der Dunkelheit leichter aufzufinden ist.

Pflegepersonal rufen

Ruftaste  **1** oder **2** drücken.

- ▶ Die Ruftaste  **1** leuchtet auf.

Pflegepersonal antwortet

1. Im Lautsprecher **11** ertönt ein Gong und die Ruftaste blinkt.
2. Das Patiententerminal wie ein Telefon für das Gespräch mit dem Pflegepersonal verwenden.
3. Das Pflegepersonal trennt die Verbindung am Gesprächsende.

Serviceeruf

Die LED der Taste glimmt ständig, damit sie in der Dunkelheit leichter aufzufinden ist.

Serviceeruftaste  **6** drücken.

- ▶ LED der Serviceeruftaste  **6** leuchtet.

Das Servicepersonal meldet sich am Gerät oder kommt persönlich.

Licht ein- und ausschalten

Die LED der Lichttasten **19** glimmen ständig, damit die Tasten in der Dunkelheit leichter aufzufinden sind.

Raumlicht (optional)

Raumlichttaste  **7** kurz drücken.

- ▶ Das Raumlicht wird ein- beziehungsweise ausgeschaltet.

Leselicht (optional)

Leselichttaste  **18** kurz drücken.

- ▶ Das Leselicht wird ein- beziehungsweise ausgeschaltet.

Menüfunktionen

Helligkeit des Displays einstellen

1. Menüaste **MENU** **5** drücken.
2. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-** **14** den Menüpunkt **Helligkeit** im Display **12** wählen.
3. Mit der **OK**-Taste **15** bestätigen.
4. Mit den **- / +**-Tasten **4** die gewünschte Helligkeit einstellen.
5. Mit der Menüaste **MENU** **5** die Menüfunktion verlassen.

Kontrast des Displays einstellen

1. Menüaste **MENU** **5** drücken.
2. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-** **14** den Menüpunkt **Kontrast** im Display **12** wählen.
3. Mit der **OK**-Taste **15** bestätigen.
4. Mit den **- / +**-Tasten **4** den gewünschten Kontrast einstellen.
5. Mit der Menüaste **MENU** **5** die Menüfunktion verlassen.

Lautstärke einstellen

1. Menüaste **MENU** **5** drücken.
2. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-** **14** den Menüpunkt **Lautstärke** im Display **12** wählen.
3. Mit der **OK**-Taste **15** bestätigen.
4. Mit den Programmwahltasten **P+ / P-** **14** wählen, für welche Funktion die Lautstärke eingestellt werden soll.
5. Mit den **- / +**-Tasten **4** die gewünschte Lautstärke einstellen.
6. Mit der Menüaste **MENU** **5** die Menüfunktion verlassen.

Optionale Funktionen

TV

TV-Gerät ein- und ausschalten

TV-Taste  **9** drücken, um das TV-Gerät ein- oder auszuschalten.

- ▶ Das TV-Gerät wird eingeschaltet und der zuletzt gesehene Kanal wird am Display **12** angezeigt.

Kanal wählen

Mit den Programmwahltasten **P+/P-** **14** zum nächsten Kanal wechseln.

Ton und Lautstärke einstellen

Ausgabe des Tons über den Lautsprecher **11** oder über einen angeschlossenen Kopfhörer (Anschlussbuchse **9**).

Mit den **-/+**-Tasten **4** die Lautstärke einstellen.

Videotext aufrufen

1. Videotexttaste  **17** drücken, um den Videotext aufzurufen oder zu verlassen.
2. Mit den Programmwahltasten **P+/P-** **14** zur nächsten Seite wechseln.

Radio

Radio ein- und ausschalten

Radiotaste  **18** drücken, um das Radio ein- oder auszuschalten.

- ▶ Das Radio wird eingeschaltet und der zuletzt gehörte Radiokanal wird am Display **12** angezeigt.

Kanal wählen

Mit den Programmwahltasten **P+/P-** **14** zum nächsten Kanal wechseln.

Ton und Lautstärke einstellen

Ausgabe des Tons über den Lautsprecher **11** oder über einen angeschlossenen Kopfhörer (Anschlussbuchse **9**).

Mit den **-/+**-Tasten **4** die Lautstärke einstellen.

Jalousiesteuerung

1. Sonderfunktionstaste  **16** drücken.
2. Mit den Programmwahltasten **P+/P-** **14** den Menüpunkt **Jalousie** im Display **12** wählen.
3. Mit den **-/+**-Tasten **4** die Jalousien öffnen oder schließen.

Infrarotempfänger

Über den Infraroteingang kann das Patiententerminal von einem Umfeldsteuergerät ferngesteuert werden.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Wien

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

[schrack-seconet.com](https://www.schrack-seconet.com)

A-1120 Wien, Eibesbrunnnergasse 18 | +43 50 857-2000

A-4060 Leonding, Dr.-Herbert-Sperl-Ring 3 | +43 50 857-2100

A-5020 Salzburg, Vogelweiderstraße 44a | +43 50 857-2400

A-6020 Innsbruck, Dr.-Franz-Werner-Straße 36 | +43 50 857-2300

A-6850 Dornbirn, Sebastianstraße 13a | +43 50 857-2500

A-8055 Graz, Neuseiersberger Straße 157 | +43 50 857-2200

A-9020 Klagenfurt, Eiskellerstraße 3 | +43 50 857-2600